

gingifast



Technical
A-Silicone for Gingival Mask

Zhermack 
Dental

gingifast elastic

L'estetica naturale.

APPLICAZIONI

La **riproduzione gengivale** in polivinilsilossano con sistema di **automiscelazione** fornisce in **tempi rapidi** la giusta morfologia nella progettazione della protesi fissa.

ESTETICA

Il **risultato estetico** di **GINGIFAST ELASTIC** è ottenuto dalla sua **trasparenza** e dalla presenza di vascolarizzazioni che gli conferiscono un effetto naturale.



1 Modello master con maschera eseguita in Zetalabor




2 Applicazione di Gingifast Separator sulla maschera ottenuta con Zetalabor



3 Particolare dello spazio ricavato sul modello master per l'iniezione di Gingifast Elastic



4 Posizionamento della maschera in Zetalabor sul modello e iniezione di Gingifast Elastic

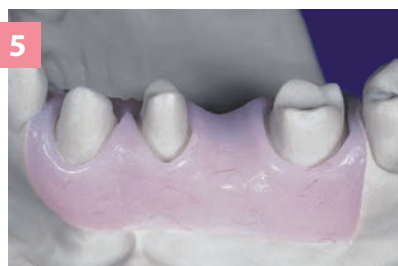

5 Particolare della maschera gengivale dopo la rifinitura



6 Lavoro finito sul modello master

gingifast

gingifast rigid

Versatile e semplice da fresare.

APPLICAZIONI


La riproduzione gengivale utilizzata in **implantoprotesi** simula il condizionamento del tessuto gengivale per la determinazione della forma dei contorni cervicali ed il profilo di emergenza della protesi.

DUREZZA

La **durezza equilibrata** facilita la **fresabilità** dei bordi durante la rifinitura della gengiva sul modello.




1 Boxaggio dell'impronta

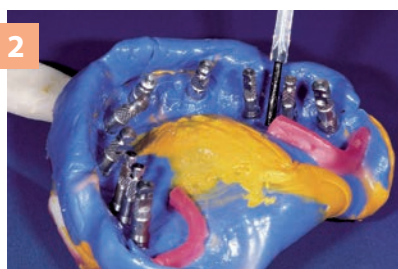

2 Applicazione di *Gingifast Separator* sull'impronta



3 Particolare del beccuccio immerso durante l'estrusione

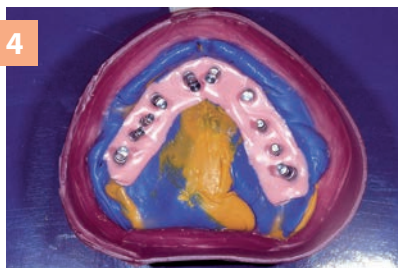

4 Impronta boxata per la colatura finale del modello



5 Particolare della gengiva riprodotta



6 Facilità di fresatura

gingifast



Confezionamenti

C401500 GINGIFAST ELASTIC	2 cartucce da 50 ml + 12 puntali di miscelazione gialli + 12 puntali intraorali gialli + 1 Separator + 1 nebulizzatore
C401520 GINGIFAST RIGID	2 cartucce da 50 ml + 12 puntali di miscelazione gialli + 12 puntali intraorali gialli + 1 Separator + 1 nebulizzatore

Accessori

C202100 DISPENSER D2	Dispenser D2 - 1:1
C202070 MIXING TIPS SMALL	Puntali di miscelazione gialli (48 pz)
C202090 ORAL TIPS	Puntali intraorali (48 pz)
C400888 SEPARATOR FOR GINGIFAST	2 flaconi da 10 ml

BRANCHES

GERMANY

Zhermack GmbH Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND

Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
+48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA

Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
+1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com