

Fulfilling your needs

# Elite Cord Paste

Zhermack's neue Retraktionspaste



**Zhermack**   
Dental

# Elite Cord Paste

Elite Cord Paste ist eine Retraktionspaste, die blutstillend und retrahierend wirkt. Sie eignet sich hervorragend um vor einer Abdrucknahme den Präparationsrand freizulegen und Flüssigkeiten wie Blut und Speichel zu minimieren.

Die fließfähige Paste kann das Fadenlegen komplett ersetzen oder als Alternative zum zweiten Faden bei der „2-Fadenmethode“ verwendet werden - je nach Situation. Um den Sulkus zu öffnen wird die Nutzung der beiliegenden Gingicaps unter Kaudruck empfohlen. Nach der Aushärtezeit von 2 Minuten im Sulkus, die die Mindestdauer darstellt, lassen sich die Rückstände der Paste einfach mit Wasser ausspülen und absaugen.

Elite Cord Paste basiert auf Kaolin-Tonerde und enthält 15% Aluminiumchlorid, wodurch es sowohl adstringierend als auch hämostatisch wirkt. Die Kaolin-Tonerde funktioniert wie ein Schwamm und garantiert so eine trockene Umgebung. Die sanfte, chemische Reaktion wird durch das Aluminiumchlorid hervorgerufen. Diese Kombination sorgt für einen trockenen, geöffneten Sulkus und schafft somit beste Voraussetzungen für optimale Abformergebnisse. Die Paste ist in praktischen Einmalkapseln abgefüllt, die mit jeder handelsüblichen Compositespritze verwendet werden können. Das macht die Anwendung einfach und zeitsparend, da keine Anmischung erforderlich ist. Außerdem werden so Kreuzkontaminationen vermieden.

Elite Cord Paste ermöglicht eine einfache, schnelle und gleichzeitig sanfte, gewebeschonende Gingivaretraktion und Flüssigkeitskontrolle. Optimal freigelegte und trockene Präparationsränder werden mit Elite Cord Paste zum Kinderspiel.



## Eigenschaften und Vorteile:

Eigenschaft	Vorteil
Kaolin-Tonerde Basis	Blutstillende und flüssigkeitskontrollierende Wirkung
15% Aluminiumchlorid	Sanft, chemisch retrahierende Wirkung
Inklusive Gingicaps	Optional zusätzliche mechanische Retraktionswirkung
Gebrauchsfertige Einmalkapseln	Schnelle und hygienische Anwendung
Sanft und gewebeschonend	Kombination chemischer und mechanischer Retraktion minimiert Gewebetraumata

Artikel	Bezeichnung	Staffel	Einzelpreis	Menge (bitte eintragen)	Bestellen
<b>C610070</b> Elite Cord Paste	Retraktionspaste inkl. 10 große + 10 normale Gingicaps	ab 1	54,-€	_____	<input type="checkbox"/>
		ab 3	49,-€		
<b>C610080</b> Elite Cord Paste, Eco.	Retraktionspaste inkl. 25 große + 25 normale Gingicaps	ab 1	135,-€	_____	<input type="checkbox"/>
		ab 3	124,-€		

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt., frachtfreie Lieferung ab 120 € Warenwert. Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.

## Hiermit bestellen wir:

Praxis:	Kundennummer:	Stempel / Unterschrift:
Straße / Nr.:	Ansprechpartner:	
PLZ / Ort:	Tel.:	
E-Mail:		

## Zhermack GmbH Deutschland

Öhlmühle 10 · D-49448 Marl am Dümmer · Telefon 05443 / 20 33 - 0 · Fax 05443 / 20 33 - 11 · [info@zhermack.de](mailto:info@zhermack.de) · [www.zhermack.de](http://www.zhermack.de)