

Para más información sobre  
estos productos visite la web  
[es.zhermack.com](http://es.zhermack.com)



# elite vest

## MAKE THE RIGHT INVESTMENT



## Easy Dental Investments

La constancia en la búsqueda de las mejores soluciones para el usuario y los muchos años de experiencia en la producción de los yesos Elite Dental Stones, nos ha guiado en estudio de la nueva gama de revestimientos Zhermack - **Elite Vest**.

La precisión personalizable y constante, obtenida con una sorprendente facilidad de uso, es la característica distintiva **Elite Vest Plus** y **Elite Vest Cast**.

El líquido universal **Elite Vest Liquid** facilita enormemente la gestión de los dos productos.



[es.zhermack.com](http://es.zhermack.com)  
[info.spain@zhermack.com](mailto:info.spain@zhermack.com)

**Zhermack**   
Dental

# elite vest PLUS



## Revestimiento universal de precisión para prótesis fijas Compatible con aleaciones de metales nobles y no\*, y cerámicas prensables

### VENTAJAS

- Universal: un solo revestimiento para trabajos de prótesis fijas con aleaciones de metales o cerámica prensable
- Pre calentamiento rápido o tradicional
- Dureza ideal para aplicaciones múltiples
- Expansión adaptable para exigencias varias
- Superficies lisas del metal después de la fusión
- Precisión óptima en prótesis implantares y puentes extensos
- Compatible con todas las aleaciones\*
- Líquido de mezcla universal Elite Vest liquid



### ¿Por qué elegir Elite Vest?

Solamente con dos tipos de polvo, Elite Vest Plus y Elite Vest Cast y un solo líquido universal Elite Vest liquid, podrás realizar prótesis dentales en todas las aleaciones\* y cerámicas prensables, con un pre calentamiento rápido o tradicional.

Los revestimientos Elite Vest están clasificados UNI EN ISO 15912 y se caracterizan por fórmulas con gránulos finos, sin grafito y una expansión adaptable a la técnica personal de trabajo.

Elige la nueva gama Elite Vest para apreciar su elevada precisión y la repetitividad constante de los resultados junto a una facilidad sorprendente de uso y gestión.

\*Aleaciones de titanio excluidas

# elite vest CAST



## Revestimiento de precisión específico para prótesis esqueléticas Compatible con aleaciones noble y no\*

### VENTAJAS

- Tiempo de trabajo óptimo
- Pre calentamiento rápido o tradicional
- Versátil y uso sencillo
- Eficiencia elevada mediante los dos tipos de pre calentamiento (rápido o tradicional)
- Desmuflado y arenado fáciles
- Permite obtener una aleación con superficies muy lisas
- Líquido de mezcla universal Elite Vest liquid



### Características técnicas

	Elite Vest Plus	Elite Vest Cast
Aplicación	Prótesis fijas	Prótesis esqueléticas
Polvo de gránulo fino	•	•
Ligante fosfático	•	•
Pre calentamiento rápido o tradicional	•	•
Líquido de mezcla	Elite Vest Liquid	Elite Vest Liquid
Expansión libre o controlable	•	•
Compatible con duplicaciones de silicona o gelatina		•
Clasificación UNI EN ISO 15912	Tipo 1, Clase 1,2	Tipo 2, Clase 1,2



Datos técnicos	Elite Vest Plus	Elite Vest Cast
Relación polvo/líquido (Elite Vest Liquid)	100 g / 24-26 ml	100 g / 18-20 ml
Tiempo de premezcla manual	15 - 30"	15 - 20"
Tiempo de mezcla al vacío (320 revoluciones/minuto)	60"	60"
Tiempo de mantenimiento del vacío después de la mezcla	15 - 30"	10 - 15"
Tiempo de trabajo (20-23°C)	6'	5'
Tiempo de introducción en el horno desde el inicio de la mezcla	23 - 25'	23 - 25'
Temperatura ideal de uso	20 - 23°C	20 - 23°C
Temperatura ideal de conservación del líquido (Elite Vest Liquid)	18 - 22°C (≥5°C)	18 - 22°C (≥ 5°C)
Temperatura de precalentamiento	850 - 900°C	900 - 930°C
Temperatura máxima de precalentamiento	1200°C	1050°C

## Envasado

## Accesorios

Código	Descripción	Código	Descripción
<b>C420000</b>	Elite Vest Plus 40x160 g	<b>XI0000060</b>	Anillo 1X
<b>C420002</b>	Elite Vest Cast 30x400 g	<b>XI0000062</b>	Anillo 3X
<b>C420010</b>	Elite Vest liquid 1000 ml	<b>XI0000064</b>	Anillo 6X
<b>C420001</b>	Elite Vest Plus 5x160 g + líquido	<b>XI0000066</b>	Anillo 9X
<b>C420003</b>	Elite Vest Plus 5x400 g + líquido	<b>XI0990050</b>	Base múltiple de goma

## BRANCHES

### GERMANY

**Zhermack GmbH Deutschland**  
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0  
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11  
info@zhermack.de  
www.zhermack.de

### POLAND

**Zhermapol Sp. z o.o.**  
ul. Augustówka 14  
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72  
+48 22 292 71 17  
F +48 22 642 07 14  
biuro@zhermack.com  
www.zhermapol.pl

### USA

**Zhermack Inc.**  
P.O. Box 4195, River Edge  
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206  
+1 (732) 389 8540  
F +1 (732) 389 8543  
info@zhermackusa.com  
www.zhermackusa.com