

SOLUTIONS

elite double



Technical
A-Silicones for Duplication

Zhermack 
Dental

ELITE DOUBLE est la gamme de silicones-A **ZHERMACK** qui s'adapte aux différents types de duplication. Les prothésistes se confient à **ELITE DOUBLE** pour la facilité d'utilisation et pour la capacité de fournir des résultats précis et constants.

elite double 8

elite double 16 Fast

elite double 16 Extra Fast

elite double 22

elite double 22 Fast


elite double 22 Extra Fast

elite double 32

elite double 32 Fast

elite double 32 Extra Fast

UNE GAMME ADAPTÉE A TOUTES LES EXIGENCES

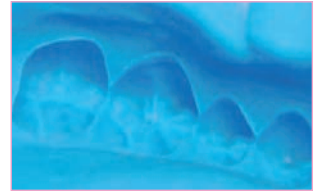

La vaste gamme de silicones **ELITE DOUBLE** permet de satisfaire les nécessités du prothésiste dentaire; elle se compose de **neuf produits** avec **quatre différentes duretés** finales et **trois temps de prise** normal, fast, et l'innovant extra fast; ce dernier est spécialement étudié pour des mélangeurs automatiques.

Les **nouvelles couleurs** ont été perfectionnées et associées à un degré d'opacité élevé **pour faciliter la lecture des épaisseurs les plus fines**.

LES SOLUTIONS POUR LES DUPLICATIONS RAPIDES

Pour reproduire et enlever un modèle en 5 minutes seulement, **ZHERMACK** recommande l'utilisation de **ELITE DOUBLE EXTRA FAST** avec le mélangeur automatique **DOUBLE MIX ZHERMACK**.




Produit	Duplication de moignons avec revêtement pour céramiques intégrales	Duplication de modèles en plâtre et/ou en résine	Duplication de modèles avec revêtement à expansion contrôlée	Duplication de modèles à expansion libre
ELITE DOUBLE 8				
ELITE DOUBLE 16 FAST				
ELITE DOUBLE 16 EXTRA FAST				
ELITE DOUBLE 22				
ELITE DOUBLE 22 FAST				
ELITE DOUBLE 22 EXTRA FAST				
ELITE DOUBLE 32				
ELITE DOUBLE 32 FAST				
ELITE DOUBLE 32 EXTRA FAST				

RAPIDITÉ ET PRÉCISION

Tous les silicones de la gamme **ELITE DOUBLE** se caractérisent par leur **rapport de mélange 1:1** et pour leur **effet "snap set"**, le **maintient constant de la fluidité** durant toute la durée de travail suivi par un passage **rapide à la phase de durcissement**.

L'effet "snap-set" permet au prothésiste dentaire de réaliser des duplications **précises** et **rapides** avec l'avantage d'un **temps de travail convenable**.

EFFET SNAP SET

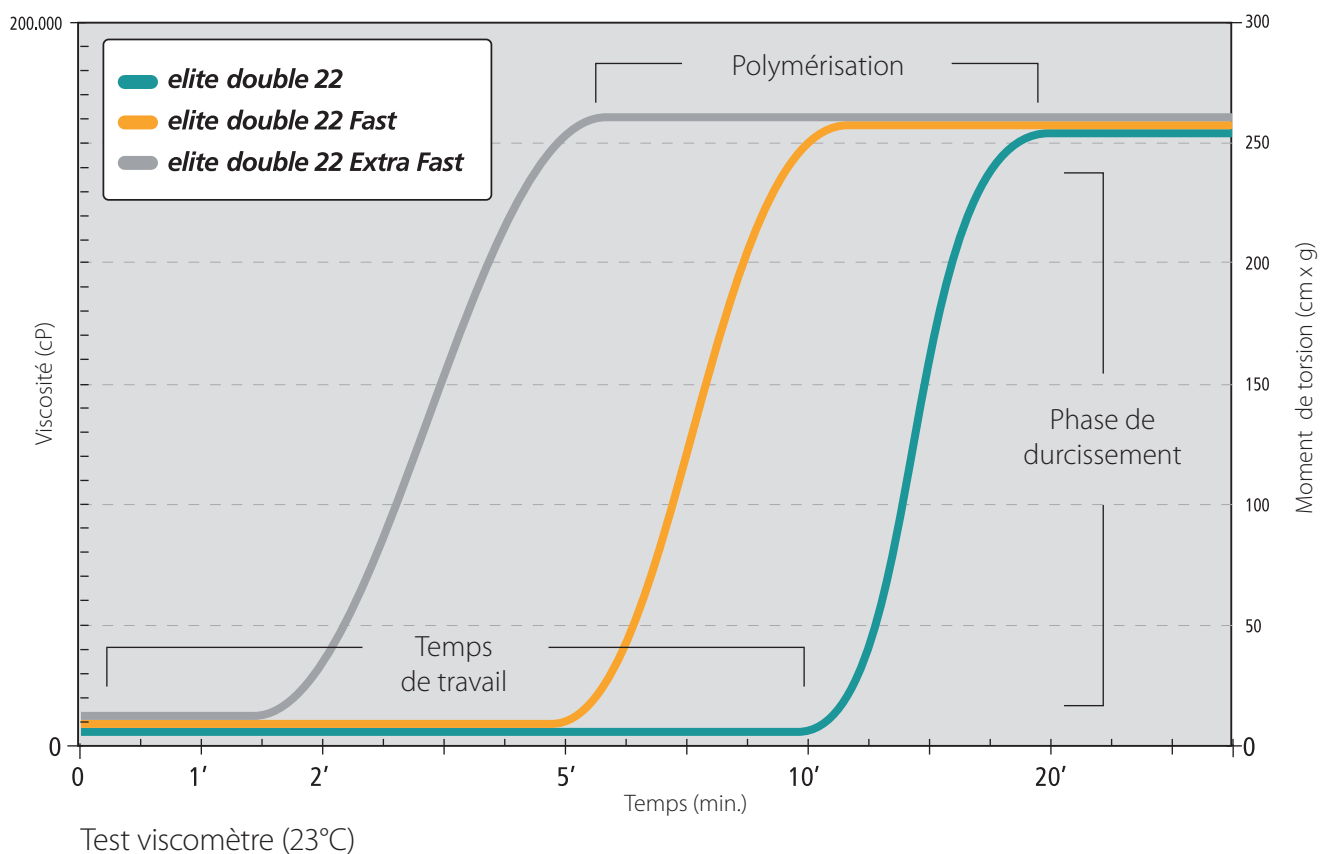

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES-MÉCANIQUES ÉQUILBRÉES

C'est grâce à l'interprétation des **exigences des prothésistes** que la recherche **ZHERMACK** a développé **ELITE DOUBLE**, le silicone de duplication qui reflète parfaitement le **juste équilibre** entre les caractéristiques physiques et mécaniques.

1. REPRISE ELASTIQUE

Grâce à sa **reprise élastique élevée (99,95%)**, le silicone de duplication **ELITE DOUBLE** retourne rapidement à sa forme originale.

2. RESISTANCE AU DECHIREMENT ET A LA LACERATION

Les silicones **ELITE DOUBLE** présentent une résistance élevée au déchirement même en présence d'épaisseurs très fines en assurant la reproduction des détails les plus infimes.

3. DUPLICATIONS PARFAITES

Les silicones **ELITE DOUBLE** démontrent une **capacité de reproduction des détails parfaite** avec une précision allant jusqu'à 2 μm .

4. DUPLICATIONS FIABLES

ELITE DOUBLE a une stabilité dimensionnelle compatible avec des plâtres, des revêtements et des résines.

FLUIDITÉ AUX NIVEAUX MAXIMUMS


ELITE DOUBLE présente une **fluidité élevée et constante** tout au long du temps de travail et garantie une **coulée homogène sans formation de bulles** pour rendre le reproduction des détails plus fidèle.



DONNÉES TECHNIQUES

Produit	Dureté Shore A après 24 heures	Temps de mélange manuel / mécanique*	Temps de travail*	Temps de prise*	Couleur
ELITE DOUBLE 8	8	1' / 30"	10'	20'	Pink
ELITE DOUBLE 16 FAST	16	1' / 30"	5'	10'	Purple
ELITE DOUBLE 16 EXTRA FAST	16	pour machines automatiques doseurs / mélangeurs	1'30"	5'	Light Purple
ELITE DOUBLE 22	22	1' / 30"	10'	20'	Teal
ELITE DOUBLE 22 FAST	22	1' / 30"	5'	10'	Orange
ELITE DOUBLE 22 EXTRA FAST	22	pour machines automatiques doseurs / mélangeurs	1'30"	5'	Grey
ELITE DOUBLE 32	32	1' / 30"	10'	20'	Light Green
ELITE DOUBLE 32 FAST	32	1' / 30"	5'	10'	Light Blue
ELITE DOUBLE 32 EXTRA FAST	32	pour machines automatiques doseurs / mélangeurs	1'30"	5'	Dark Orange

*Les valeurs indiquées sont mesurées à 23 °C

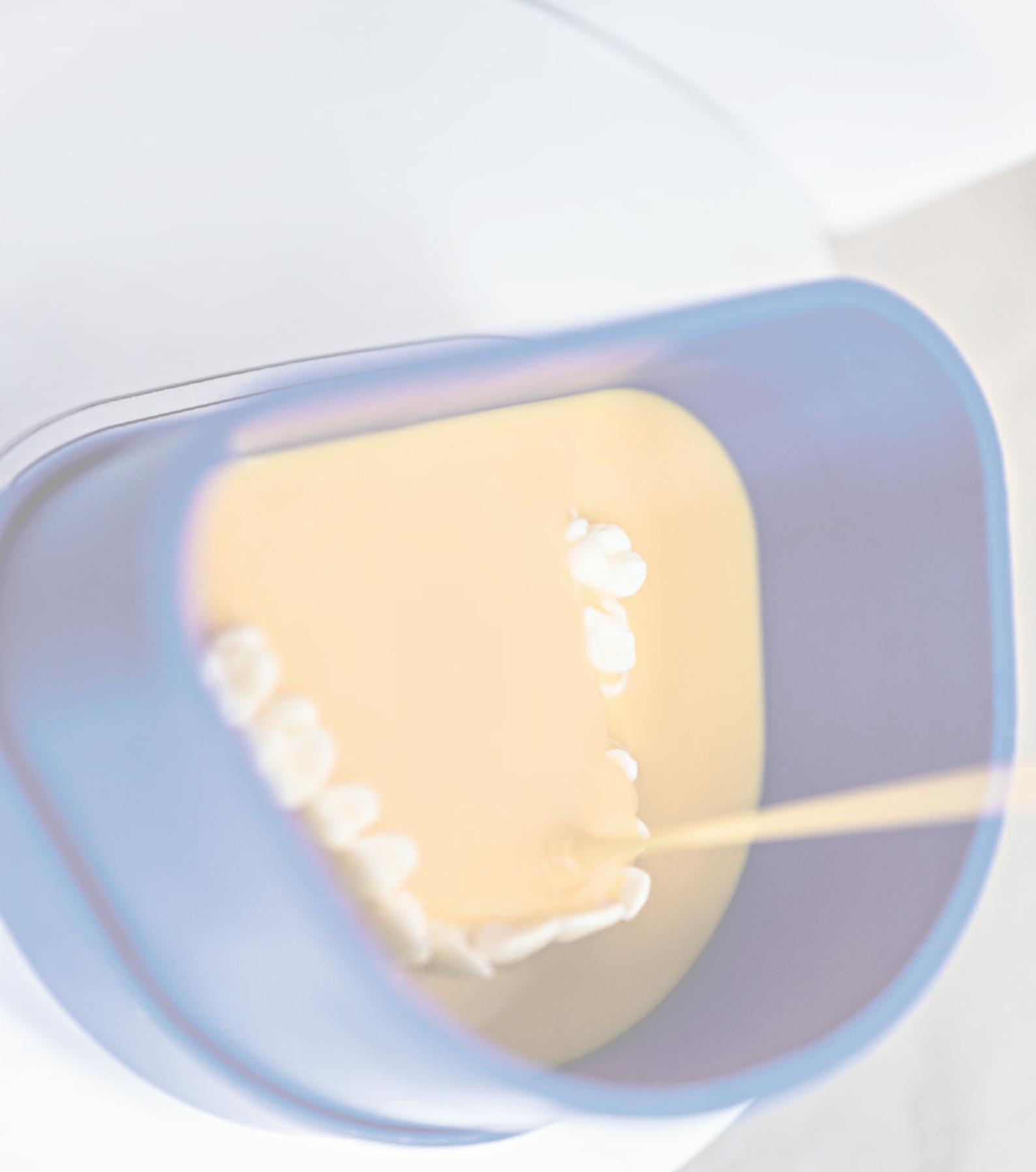

elite double solutions

Redouble la perfection

Zhermack 
Dental

elite double



Conditionnements

	250 g (Base) + 250 g (Catalyst)	1 Kg (Base) + 1 Kg (Catalyst)	5 Kg (Base) + 5 Kg (Catalyst)
ELITE DOUBLE 8	C400820	C400830	C400850
ELITE DOUBLE 16 FAST	C400825	C400831	C400847
ELITE DOUBLE 16 EXTRA FAST	-	-	C400848
ELITE DOUBLE 22	C400821	C400832	C400840
ELITE DOUBLE 22 FAST	C400823	C400834	C400842
ELITE DOUBLE 22 EXTRA FAST	-	C400838	C400849
ELITE DOUBLE 32	-	C400833	C400841
ELITE DOUBLE 32 FAST	-	C400836	C400843
ELITE DOUBLE 32 EXTRA FAST	-	-	C400853

Accessoires

C400530 TENSILAB	1 flacon de 120 ml + nébulisateur
C400900 EROGATEUR	Erogateur pour conditionnements de 5 kg

Équipement

C309020 DOUBLEMIX	Mélangeur automatique
-------------------	-----------------------

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
+48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
+1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com