


# elite P&P

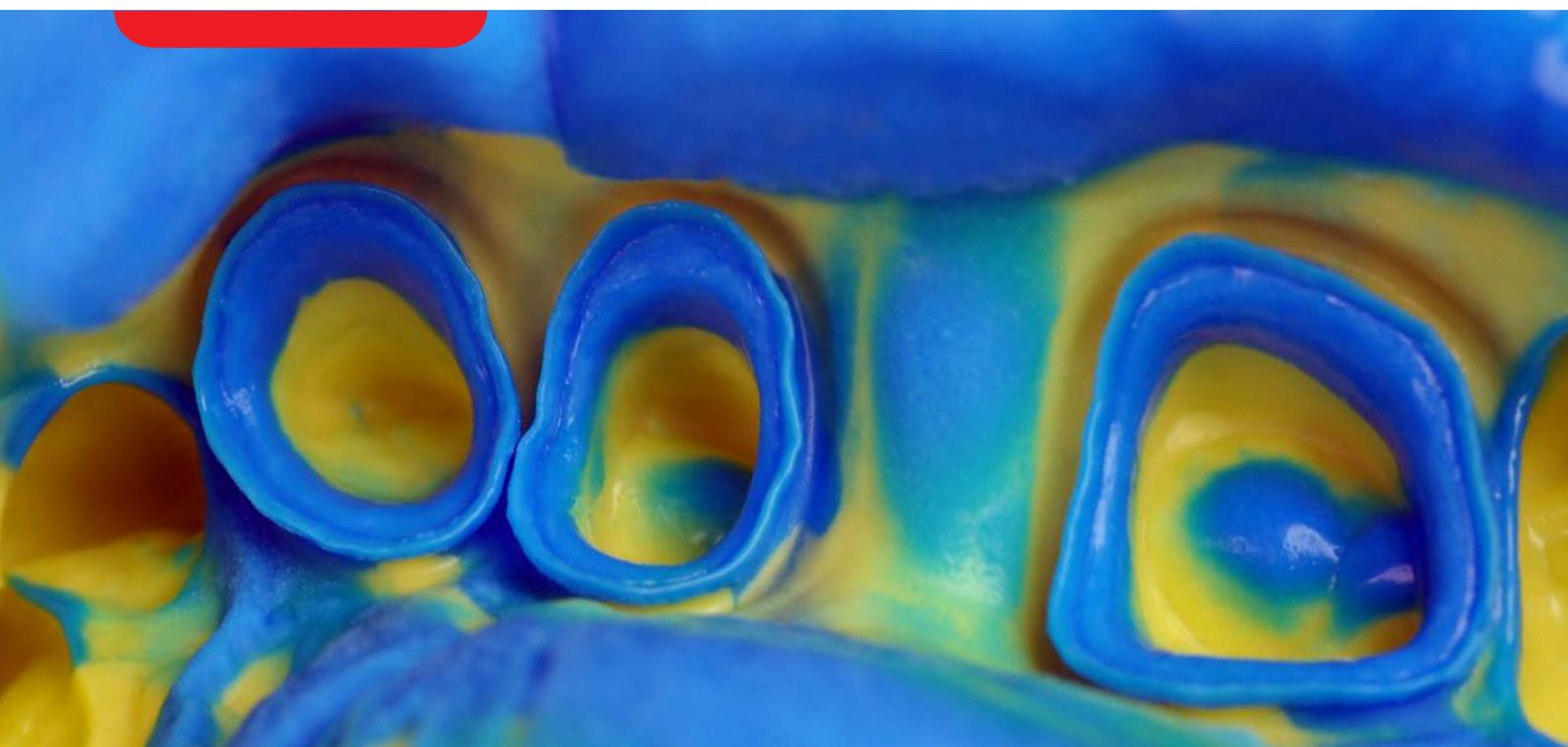

PRECISION & PERFORMANCE


A-силикон для мастер-оттисков

**Zhermack**   
Dental

# Elite P&P, точность и функциональность

**Elite P&P**, Precision & Performance, – это линейка многоцелевых, практичных и простых в использовании оттисковых А-силиконов. Три типа вязкости материала – вязкая база (putty), а также высоко-текучий (light) и средне-текучий (regular) корректирующие слои – удовлетворяют всем нуждам стоматолога в любой клинической ситуации.

**Elite P&P** особо рекомендуется стоматологам, привыкшим работать с С-силиконами, но желающими получать более точные и функциональные оттиски.

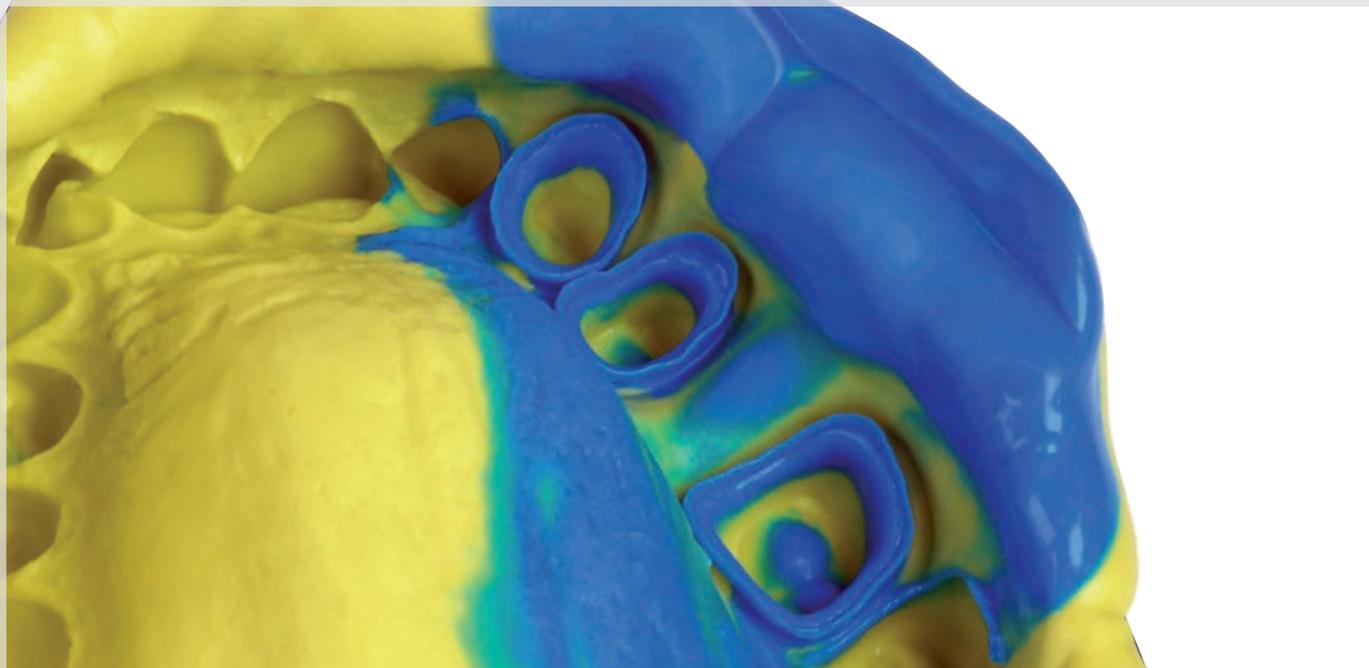


# Точность

## Высокий уровень гидросовместимости и точности

Повышенная гидросовместимость **Elite P&P Light** и **Regular** способствует легкому проникновению материала в десневую борозду в присутствии жидкостей полости рта, позволяя таким образом получать более точные по сравнению с С-силиконами оттиски.

## Превосходная текучесть


При подвергании давлению материалы **Elite P&P** с вязкостью **Light** и **Regular** легко проникают внутрь труднодоступных участков. При этом они не стекают и не капают.

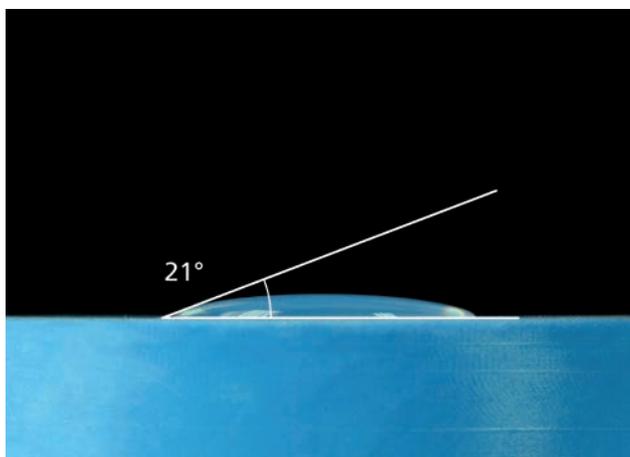


Угол контакта



Elite P&P не стекает (Elite P&P Light Fast)

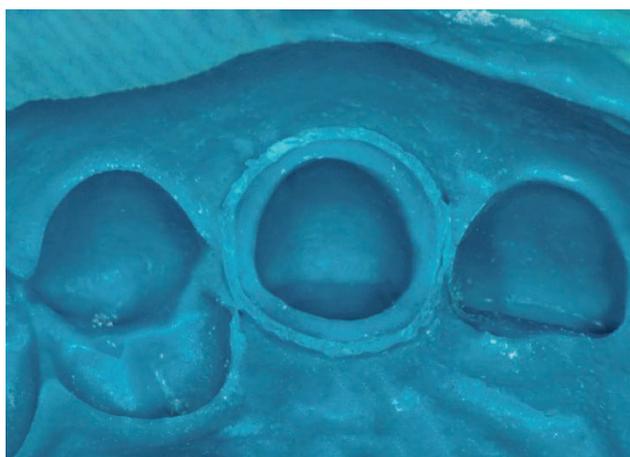

Точность воспроизведения деталей (Elite P&P Light Normal)

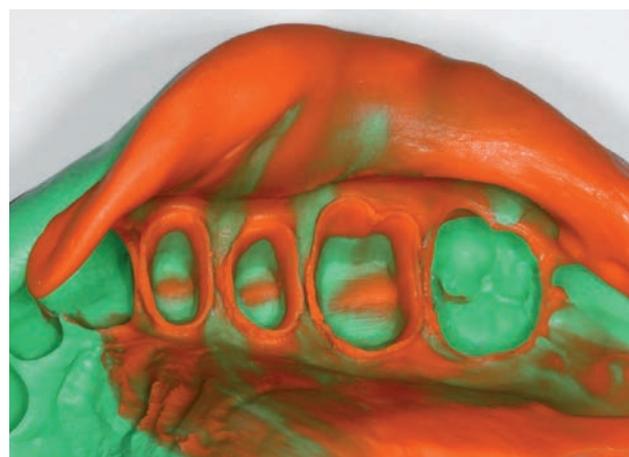

Результат применения Elite P&P Putty и Light Fast

# Функциональность

## Простота использования

**Соотношение 1:1** между базовой массой и катализатором упрощает **этап ручного замешивания Elite P&P putty и корректирующих слоев** в тубиках. Это даёт преимущество **постоянного уровня**

**текучести** в течение всего времени обработки. Варианты **Light Body (normal и fast set)** и **Regular Body (normal set)**, предлагаемые в картриджах автоматического смешивания, позволяют легко выдавливать материал и экономить время.




Соотношение 1:1 упрощает ручное смешивание



Точная и быстрая экструзия

## Высокая стабильность размеров

В отличие от аналогов, выполненных с помощью С-силиконов, оттиски из **Elite P&P** сохраняют стабильность размеров на протяжении долгого времени, позволяя получить **высокоточные модели** даже при отливке через две недели после снятия оттиска.


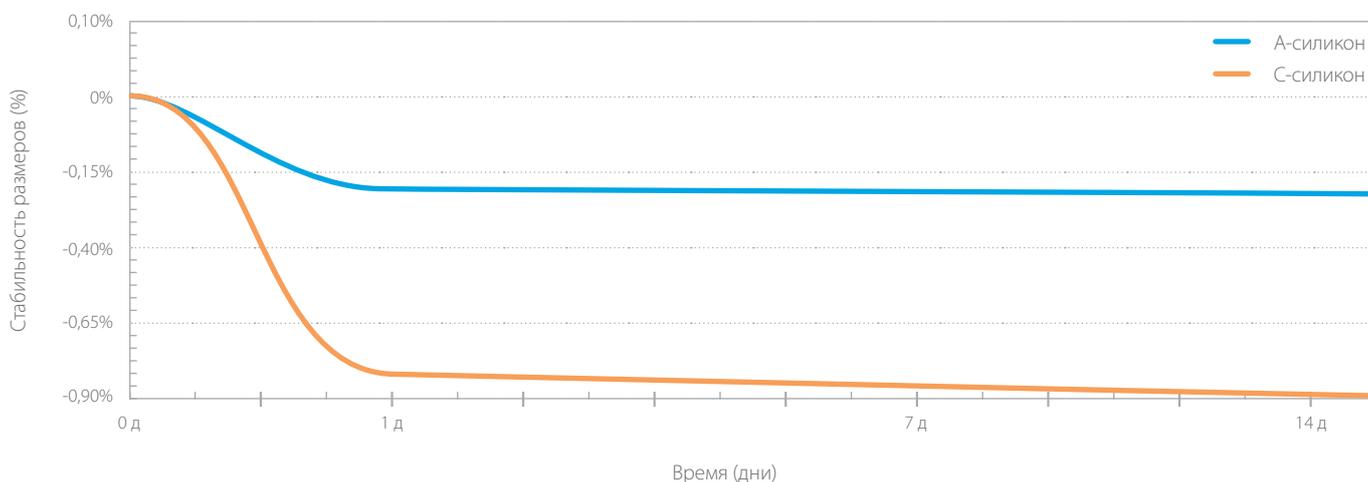


## Клинические показания для разных техник снятия оттиска

### 2 ЭТАПА • 2 ВЯЗКОСТИ

#### NORMAL SET

— Время отверждения 5'30" —  
— Время обработки 2'00" — — — — —  
— Время в полости рта 3'30" —

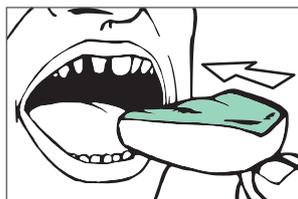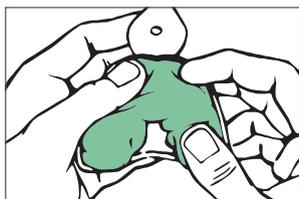


— Время обработки 1'30" — — — — —  
— Время в полости рта 2'30" —  
— Время отверждения 4'00" —

#### FAST SET

#### NORMAL SET

— Время отверждения 5'30" —  
— Время обработки 2'00" — — — — —  
— Время в полости рта 3'30" —

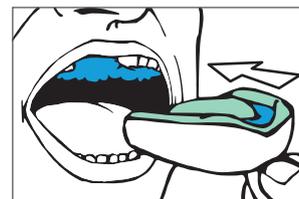




— Время обработки 1'30" — — — — —  
— Время в полости рта 2'30" —  
— Время отверждения 4'00" —

#### FAST SET

### 1 ЭТАП • 2 ВЯЗКОСТИ

#### NORMAL SET

— Время отверждения 5'30" —  
— Время обработки 2'00" — — — — —  
— Время в полости рта 3'30" —

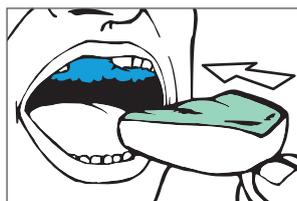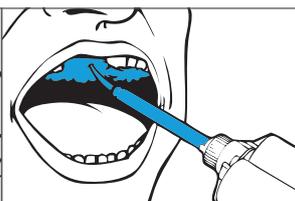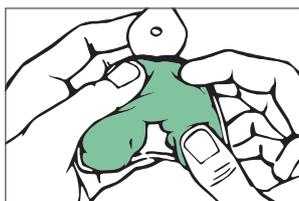

## Рекомендуемые продукты

### 2 ЭТАПА • 2 ВЯЗКОСТИ

Elite P&P Putty Normal + Light Normal  
Elite P&P Putty Fast + Light Fast  
Elite P&P Putty Normal + Regular Normal

### 1 ЭТАП • 2 ВЯЗКОСТИ

Elite P&P Putty Normal + Light Normal  
Elite P&P Putty Normal + Regular Normal



## Elite P&P Putty Soft - А-силикон очень высокой вязкости

Код	Время отверждения	Упаковка
C206000	Normal Set	Standard Pack: 250 мл База + 250 мл Катализатор в баночках
C206001	Fast Set	
C206100	Normal Set	Intro Kit Light Normal Set: Putty Soft Normal 250 мл База + 250 мл Катализатор в баночках + 2 x 60 мл тубы Light Body Normal + блокнот для смешивания
C206101	Normal Set	Intro Kit Regular Normal Set: Putty Soft Normal 250 мл База + 250 мл Катализатор в баночках + 2 x 60 мл тубы Regular Body Normal + блокнот для смешивания
C206102	Normal Set	Intro Kit Light Normal Set: Putty Soft Normal 250 мл База + 250 мл Катализатор в баночках + 2 x 50 мл картриджа Light Body Normal + диспенсер D2 + 6 желтых смесительных наконечников + 2 интраоральные канюли
C206110	Normal Set	Trial Kit Light Normal Set: Putty Soft Normal 100 мл База + 100 мл Катализатор в баночках + 2 x 60 мл тубы Light Body Normal



NORMAL FAST

## Elite P&P Regular Body - А-силикон средней вязкости

Код	Время отверждения	Упаковка
C206021	Normal Set	Standard Pack: 2 x 60 мл тубы (База + Катализатор)
C206012	Normal Set	Standard Pack: 2 x 50 мл картриджа (База + Катализатор) + 6 желтых смесительных наконечников
C206101	Normal Set	Intro Kit Regular Normal Set: Putty Soft Normal 250 мл База + 250 мл Катализатор в баночках + 2 x 60 мл тубы Regular Body Normal + блокнот для смешивания



## Elite P&P Light Body - А-силикон низкой вязкости

Код	Время отверждения	Упаковка
C206020	Normal Set	Standard Pack: 2 x 60 мл тубы (База + Катализатор)
C206010	Normal Set	Standard Pack: 2 x 50 мл картриджа (База + Катализатор) + 6 желтых смесительных наконечников
C206011	Fast Set	
C206100	Normal Set	Intro Kit Light Normal Set: Putty Soft Normal 250 мл База + 250 мл Катализатор в баночках + 2 x 60 мл тубы Light Body Normal + блокнот для смешивания
C206102	Normal Set	Intro Kit Light Normal Set: Putty Soft Normal 250 мл База + 250 мл Катализатор в баночках + 2 x 50 мл картриджа Light Body Normal + диспенсер D2 + 6 желтых смесительных наконечников + 2 интраоральные канюли
C206110	Normal Set	Trial Kit Light Normal Set: Putty Soft Normal 100 мл База + 100 мл Катализатор в баночках + 2 x 60 мл тубы Light Body Normal



NORMAL FAST