


ELITE TRANSPARENT

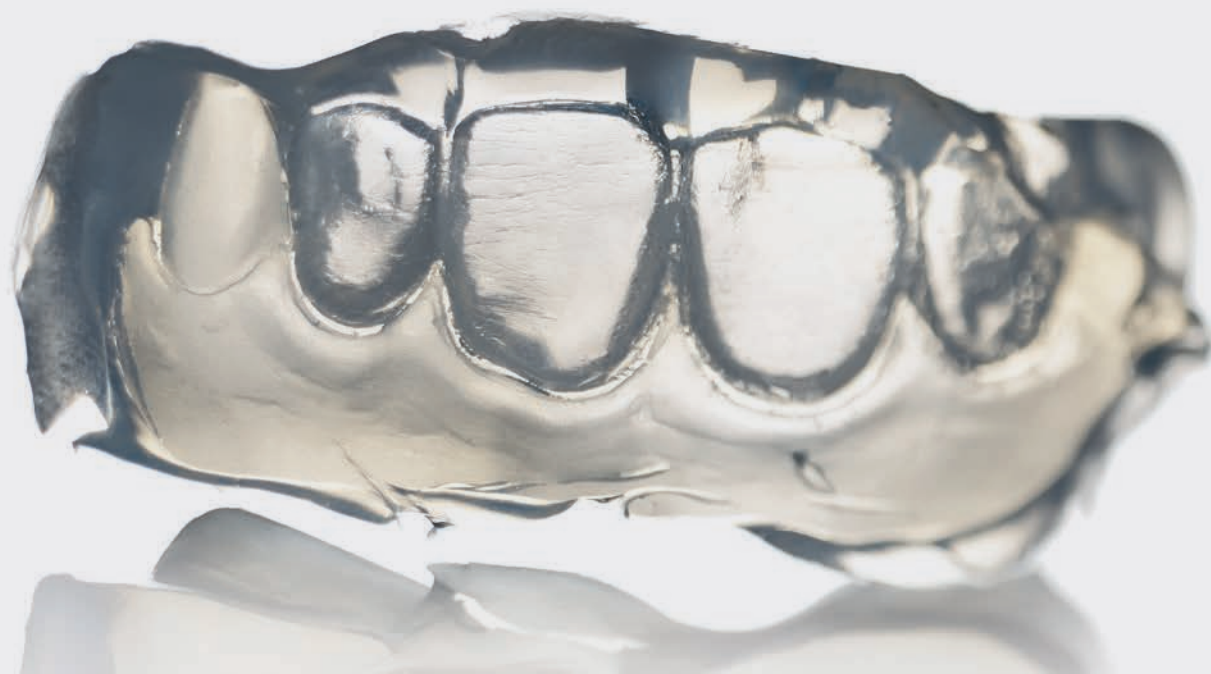

INSTRUKCJA UŻYCIA

Silikon addycyjny do wykonywania przedlewów dla żywic światłoutwardzalnych

Elite Transparent, simplify your work

**Elite Transparent jest przezroczystym,
płynnym dwuskładnikowym silikonem addycyjnym.**

Przeznaczony jest do wykonywania w laboratorium przezroczystych przedlewów silikonowych dla kompozytów i światłoutwardzalnych żywic.



1.

UZUPEŁNIENIA TYMCZASOWE Z ELITE TRANSPARENT

Zastosowanie przezroczystych silikonów oraz światłoutwardzalnych kompozytów pozwala na wykonywanie estetycznych uzupełnień tymczasowych, przy oszczędności czasu bez utraty jakości.

Zastosowane materiały: Elite Transparent, Elite Rock.

Model



Wax-up



Aplikacja Elite Transparent





4



Należy przykleić przezroczystą folię w celu wygładzenia powierzchni przedlewu. Po zakończeniu tej fazy, podczas twardnienia silikonu model można poddać ciśnieniu wynoszącemu 2 bary

Przedlew z Elite Transparent



5

Wypełnić przedlew kompozytem (dentyna)



6

Należy przykleić przedlew i spolimeryzować światłem UV



7

Tymczasowe uzupełnienie przed wykończeniem



8

Cut back (redukcja dentyny w celu utworzenia miejsca pod szklivo)



9

Wypełnić przedlew kompozytem (szklivem)



10



Nałożyć przedlew i spolimeryzować światłem UV



11

EFEKT KOŃCOWY
po wykończeniu i polerowaniu





Dane techniczne

Czas pracy* (min:s)	Czas wiązania* (min:s)	Zmiana wymiarów liniowych (po 24 godzinach)	Twardość (Shore A po 1 h)	Wytrzymałość na rozciąganie	Wytrzymałość na rozdarcie
1:30	15:00	0,18%	72	6,5 N/mm ²	4 N/mm

*Podane czasy dotyczą momentu rozpoczęcia fazy mieszania w temperaturze 23°C (73°F).

Kody



Elite Transparent – Silikon addycyjny do przedlełów

Kod	Opakowanie
C401600	1 kartridż 50 ml + 6 żółtych końcówek mieszających

Dowiedz się więcej o powiązanych produktach Zhermack do przedlełów dla materiałów światłoutwardzalnych



Elite Rock

Bardzo twardy gips typu 4 na modele robocze na protezy stałe

Więcej informacji możesz uzyskać na naszej stronie internetowej www.zhermack.com



Fulfilling your needs