

FURNACE DE



EN - Quick guide | TR - Hızlı başlangıç kılavuzu

SUPPLIED ACCESSORIES STANDART AKSESUARLAR

Maintenance and use manual
Bakım ve kullanım kılavuzu

Ceramic air bleeder
Seramik hava boşaltma sübabı

Fuse
Sigorta

DE 1
DE 2
DE 3

DESCRIPTION OF STANDARD COMPONENTS STANDART BİLEŞEN AÇIKLAMALARI

Door open/close handle
Kapak açma/kapama el parçası

Magnetic closure
Manyetik kapanma

Control panel
Kontrol paneli

Door microswitch
Kapak mikrosivici

Main switch
Cihaz açma/kapama tuşu

DESCRIPTION OF CONTROLS KONTROL AÇIKLAMALARI

prog.

PROGRAM
Programming LED
Programlama LED ışığı



HEATING
Shows, on display, that element is on
Ekranda ilgili kısım çalıştığını belirtir

key PROG.: Access to programmes key
"PROG" tuşu: Programlara erişme

key +: to increase data settings
"+" tuşu: Veri değerlerini yükseltme



cycle

CYCLE

Three-colour LED to indicate on display the following phases:

- green: delayed start.
- yellow: temperature increase.
- orange: stabilisation.





Aşağıdaki aşamaları üç farklı LED ışığı ile ekranda gösterir:

- yeşil: gecikmeli başlatma.
- sarı: sıcaklık yükseltme.
- turuncu: sabitleme.


key cycle - Oven start programming key
"Cycle" tuşu: Kazan programı başlatma

key -: to decrease data settings
"- " tuşu: Veri değerlerini azaltma

A PUTTING THE MACHINE INTO SERVICE CİHAZIN ÇALIŞMAYA HAZIRLANMASI

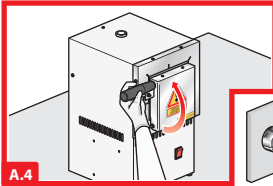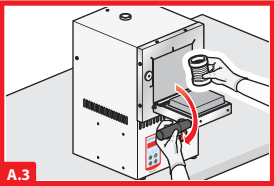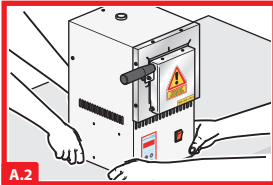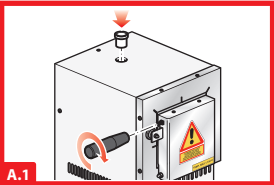

B START-UP BAŞLATMA

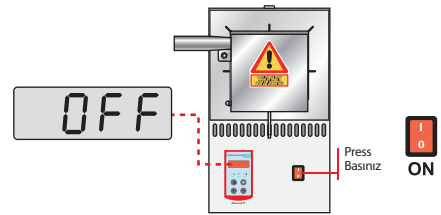


After pressing the main switch wait about 10 seconds before beginning data programming.
On/Off tuşuna bastıktan sonra yaklaşık 10 saniye bekleyiniz daha sonra data programlamaya başlayınız.

Should, after pressing the main switch the word OFF fails to appear on the display and, instead, there appear four numbers, press CYCLE.
On/Off tuşuna basılmasını takiben ekranda OFF yazısının görünümü kaybolup; dört adet numara belirir ise "CYCLE" tuşuna basınız.

1


PROGRAMMING PROGRAMLAMA

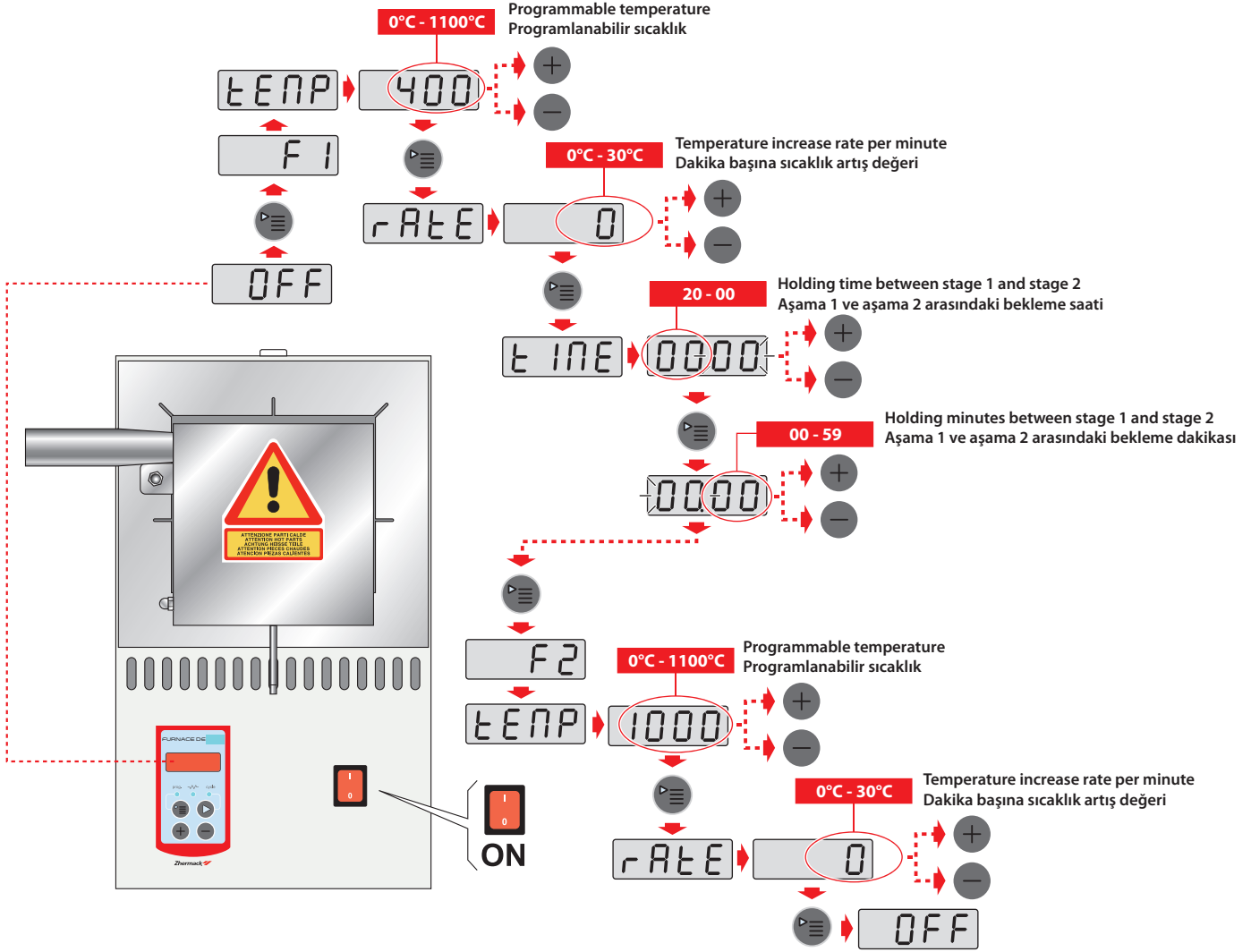

To modify data settings press the CYCLE key to exit programming and return the oven to the initial OFF status.
Data verilerini modifiye etmek için "CYCLE" tuşuna basarak programlamaya çıkın ve fırını başlangıçtaki "OFF" durumuna getirin.

2

IMMEDIATE START ANINDA BAŞLATMA

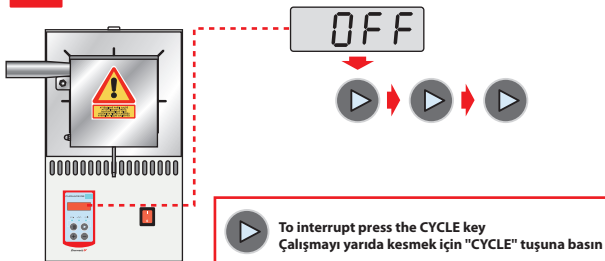

DO NOT CLEAN WITH ALCOHOL
ALKOL İLE TEMİZLEME YAPMAYINIZ

3

DELAYED START GECİKMELİ BAŞLATMA

