

acrytemp



INSTRUCCIONES DE USO

Resina biacrílica autopolimerizable para restauraciones provisionales de corta y larga duración

Acrytemp, as confident
as a natural smile



Acrytemp es una resina biacrílica autopolimerizable para profesionales que buscan un producto fiable y versátil.

La gama **Acrytemp** está disponible en cartuchos 4:1 de 50 ml, que son compatibles con los dispensadores 4:1 y 10:1 disponibles en el mercado que más se utilizan, y se ofrece en cinco colores diferentes: A1, A2, A3, A3.5 y B1.

La resistencia a la fractura y la fluorescencia natural de **Acrytemp** permiten obtener un resultado fiable y atractivo que satisface tanto a profesionales como a pacientes.

DATOS TÉCNICOS

Tiempo de trabajo	0'50"
Tiempo de endurecimiento en la cavidad oral	1-2 minutos
Tiempo de endurecimiento extraoral (en agua caliente a 50°C)	1'30"
Tiempo de endurecimiento extraoral (a temperatura ambiente)	Mín. 3'00"
Resistencia a la compresión	250 MPa
Resistencia a la flexión	65 MPa
Contracción volumétrica	5%
Temperatura máx. alcanzada durante la polimerización	37°C
Duración	2 años
Colores	A1, A2, A3, A3.5, B1


1.

TÉCNICA DIRECTA

El dentista lleva a cabo la restauración provisional en la misma sesión que prepara el muñón o los muñones.



Situación inicial

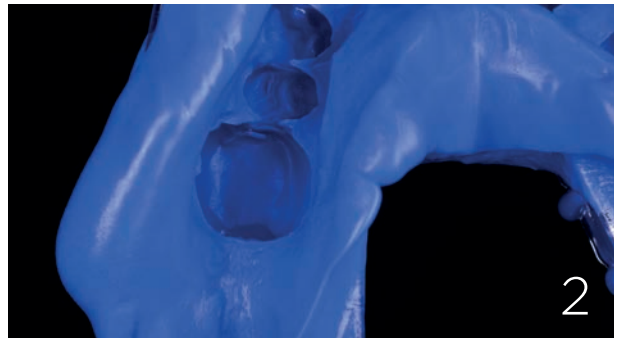


Impresión




Preparación del muñón



Aplicación de Acrytemp

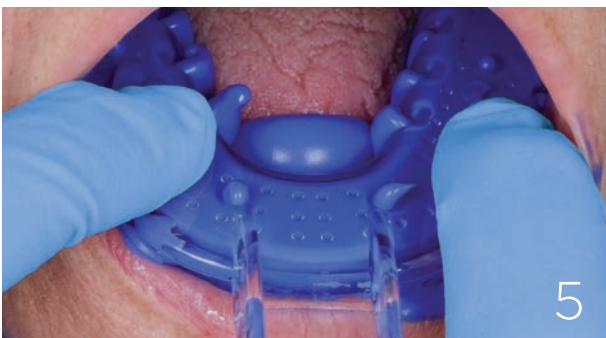

Ajuste de la posición de la impresión

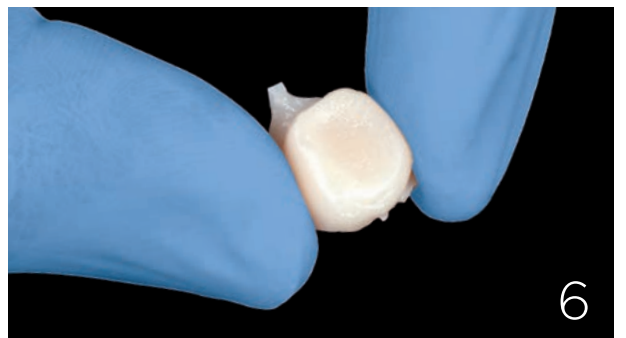

Extracción de la restauración provisional polimerizada de la impresión

VENTAJAS PRINCIPALES:


- No se requieren fases intermedias de laboratorio.
- Al realizarse en una sola sesión, se evita que el paciente tenga que concertar más citas.



Repasado



Pulido

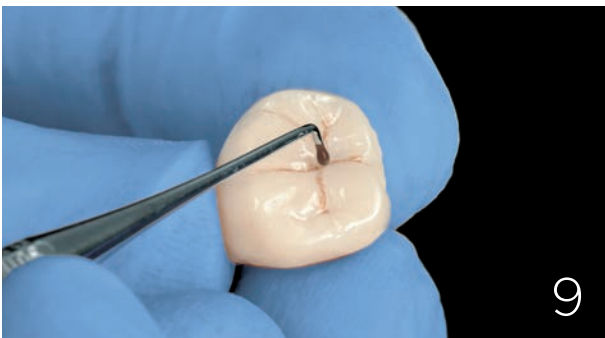

Caracterización



Resultado final

2.

TÉCNICA INDIRECTA-DIRECTA PREVIA AL LIMADO

El protésico dental realiza la restauración provisional antes de la sesión de preparación del muñón o los muñones.



Impresión



Modelo de yeso y encerado



Llave de silicona



Eliminación de cera

VENTAJAS PRINCIPALES:

- No se requieren más citas tras la fase de preparación.



Preparación de los muñones



Llenado por prensado



Eliminación de la llave



Resultado final

3.

TÉCNICA INDIRECTA POSTERIOR AL LIMADO

El protésico dental realiza la restauración provisional después de la sesión de preparación del muñón o los muñones.




Preparación del muñón



Impresión




Modelo de yeso y encerado

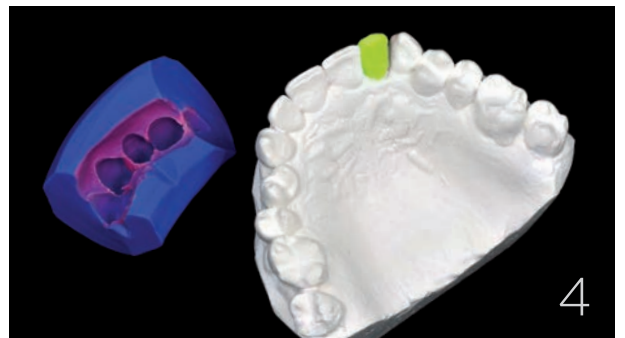

Llave de silicona



Realización de la restauración provisional

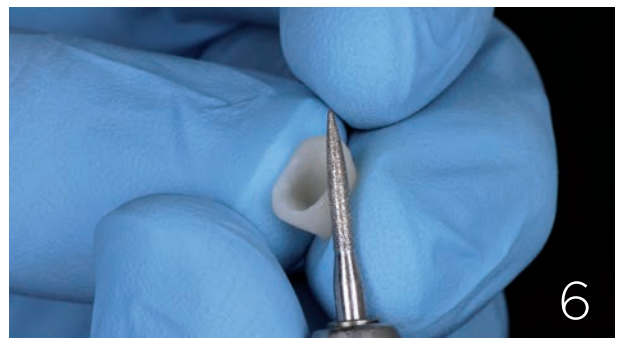


Repasado

VENTAJAS PRINCIPALES:

- Mejor adaptación marginal
- Sesiones más cortas



Pulido

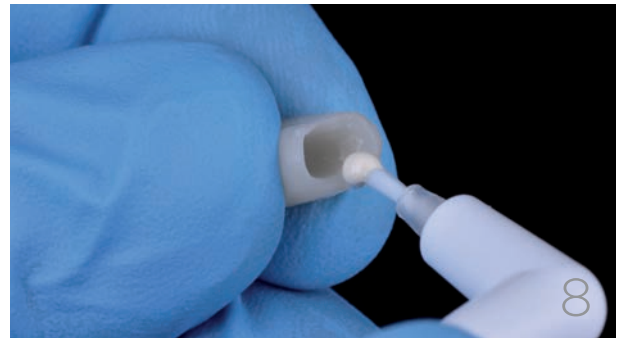

Cementación



Resultado final

4.

MUESTRA

La muestra permite realizar una representación intraoral del resultado final tras la rehabilitación. También puede servir de guía para preparar la prótesis.




Situación inicial




Impresión




Modelo de yeso y encerado

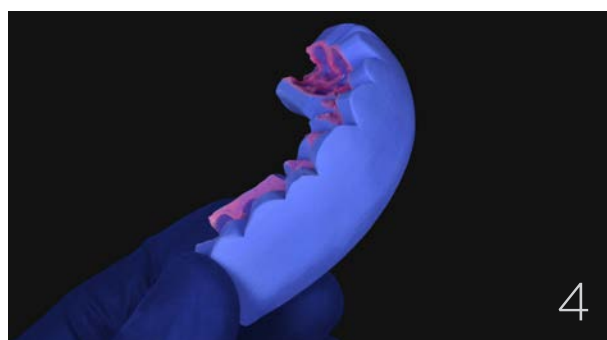

Llave de silicona (vista vestibular)

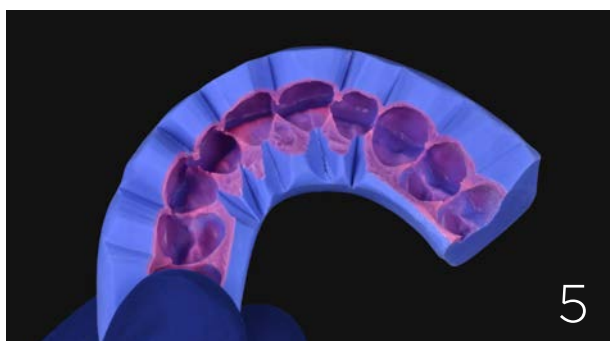

Llave de silicona (vista oclusal)

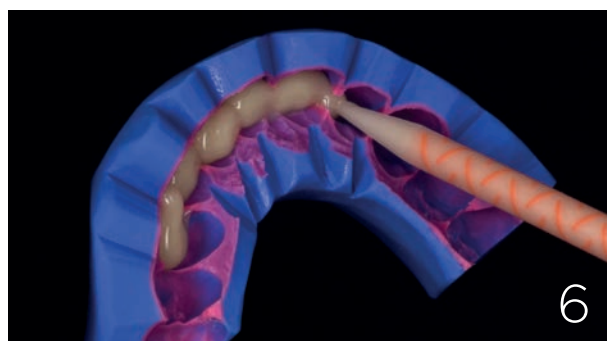

Aplicación de Acrytemp

VENTAJAS PRINCIPALES:

- Mejora la comunicación entre el dentista y el paciente.
- Permite al dentista y al paciente controlar el resultado estético y funcional de la futura rehabilitación.



Posicionamiento de la llave



Muestra acabada



Resultado final



Códigos



Acrytemp - Resinas para restauraciones provisionales

Código	Color	Envase
C700201	A1	1 cartucho de 50 ml (76 g) + 15 puntas mezcladoras 4:1
C700200	A2	1 cartucho de 50 ml (76 g) + 15 puntas mezcladoras 4:1
C700215	A3	1 cartucho de 50 ml (76 g) + 15 puntas mezcladoras 4:1
C700205	A3,5	1 cartucho de 50 ml (76 g) + 15 puntas mezcladoras 4:1
C700211	B1	1 cartucho de 50 ml (76 g) + 15 puntas mezcladoras 4:1

Accesorios

Código	Producto
C700230	Dispensador 4:1 D2
C700240	Puntas mezcladoras 4:1 (50 unidades)