


GINGIFAST

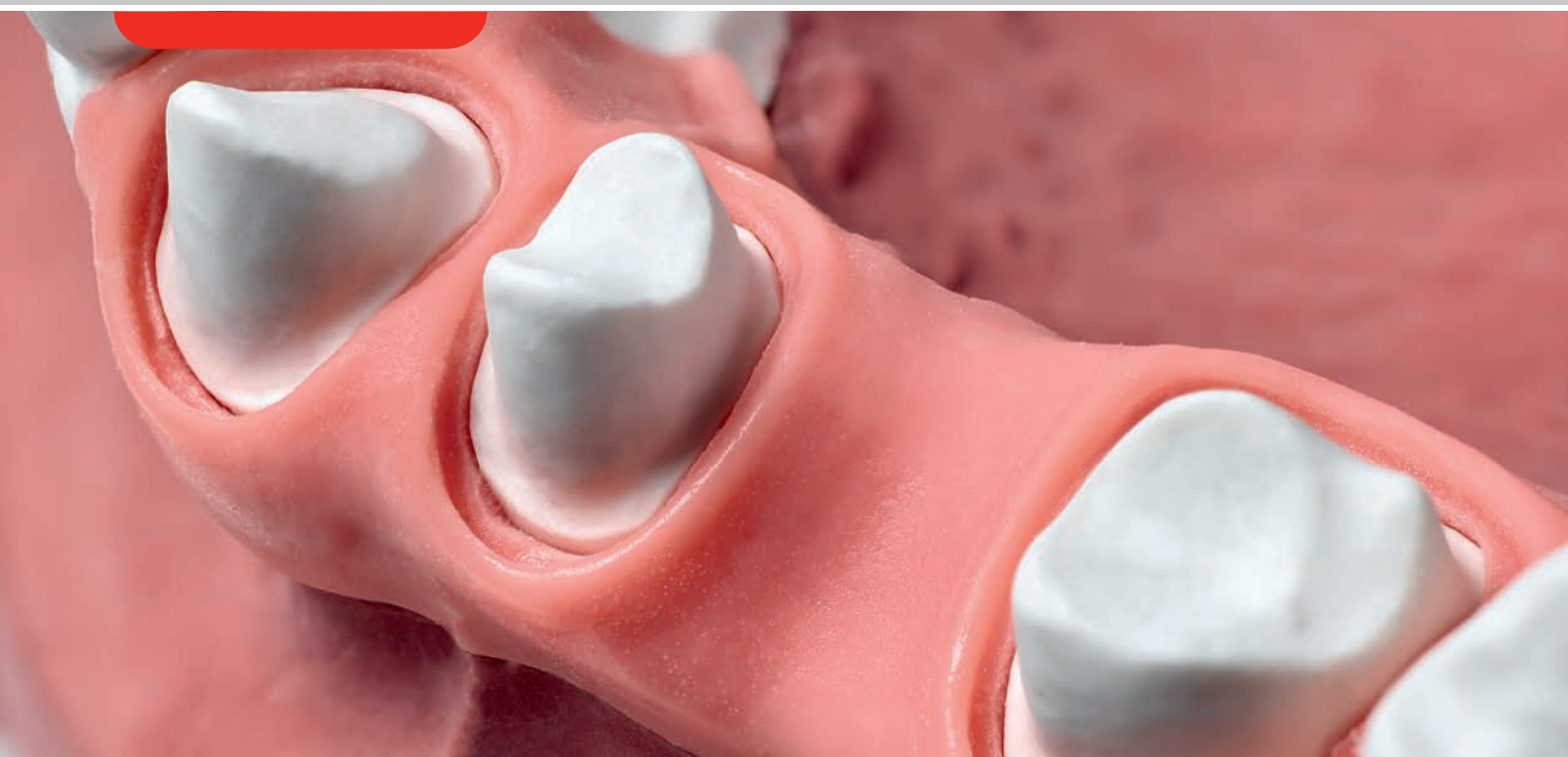

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Silicone par addition pour reproduction gingivale

Gingifast, aesthetics & performing versatility



Gingifast est la ligne de silicones par addition pour la reproduction de la morphologie des gencives dans les modèles de prothèses fixes et les applications d'implants.

Gingifast Elastic garantit d'excellents résultats esthétiques, grâce à sa translucidité et à la présence de vascularisations.

Gingifast Rigid est indiqué pour la technique directe. Grâce à sa dureté équilibrée, il peut être travaillé facilement et constitue un produit haut de gamme dans le domaine de la prothèse d'implant.

Gingifast CAD est un silicone fluide numérisable qui complète la gamme. Numérisable et lisible sans nécessiter de sprays réfléchissants, il est conçu pour une performance maximale dans l'acquisition de données 3D.

Zhermack propose le **masque gingival** le plus adapté pour chaque type d'application.

Produit	Convient en présence de zones rétentes	Convient en présence d'implants
Gingifast Elastic	●	○
Gingifast Rigid	○	●
Gingifast CAD Elastic	●	●
Gingifast CAD Rigid	○	●

● convient parfaitement ○ convient


1. GINGIFAST RIGID

TECHNIQUE DIRECTE

On travaille directement sur l'empreinte, c'est la technique idéale en prothèse d'implant.


Matériaux utilisés : Hydrorise Implant, Gingifast Rigid, Elite Rock.

Empreinte avec analogues

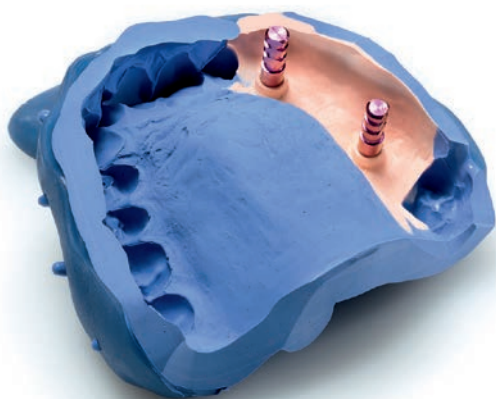

1

Barrières en cire

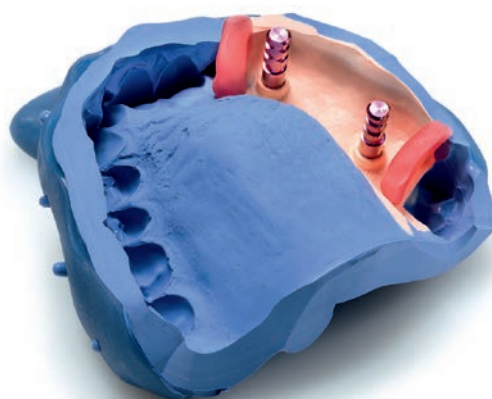

2

Application
du séparateur



3

Application
Gingifast Rigid



4



Création de points de repère
et emboilage de l'empreinte



5

Coulage du plâtre



6

RÉSULTAT FINAL



2. GINGIFAST ELASTIC

TECHNIQUE INDIRECTE


On travaille directement sur le modèle en plâtre, c'est la technique conseillée pour la reproduction gingivale en cas de moignons naturels.

Matériaux utilisés : Gingifast Elastic, Zetalabor, Elite Base, Elite Rock.

Modèle maître



Clé d'enregistrement en Zetalabor

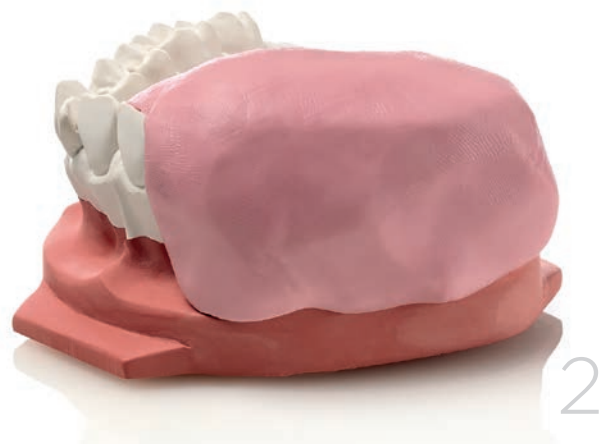

Enlèvement de la clé d'enregistrement



Moignons amovibles



4



Créer les trous pour injecter le silicone et l'application du séparateur sur la clé d'enregistrement



5

Repositionnement de la clé d'enregistrement sur le modèle maître



6

Injection de Gingifast Elastic à l'intérieur de la clé d'enregistrement



7



Injection de Gingifast Elastic terminée
(débordement du matériau des canaux d'évacuation)



Retirer la clé d'enregistrement
(canaux d'évacuation présents sur la gencive)
puis finir la gencive,
en supprimant les canaux d'évacuation



RÉSULTAT FINAL







Caractéristiques techniques

Produit	Rapport de mélange (Base : Catalyseur)	Temps de travail* (min:s)	Temps de prise* (min:s)	Dureté (Shore A)	Numérisable sans spray	Fraisage possible
Gingifast Elastic	1:1	2:00	10:00	40		
Gingifast Rigid	1:1	2:00	10:00	70		●
Gingifast CAD Elastic	1:1	2:00	10:00	40	●	●
Gingifast CAD Rigid	1:1	2:00	10:00	70	●	●

*Les temps indiqués se réfèrent au moment de début de la phase de mélange à une température de 23°C (73°F).

Codes



Gingifast Elastic - Silicone par addition pour reproduction gingivale

Code	Conditionnement
C401500	2 cartouches de 50 ml + 1 flacon de Separator pour Gingifast de 10 ml + 12 embouts de mélange (small) + 12 embouts intra-oraux + 1 spray



Gingifast Rigid - Silicone par addition pour reproduction gingivale

Code	Conditionnement
C401520	2 cartouches de 50 ml + 1 flacon de Separator pour Gingifast de 10 ml + 12 embouts de mélange (small) + 12 embouts intra-oraux + 1 spray



Gingifast CAD Elastic - Silicone par addition numérisable pour reproduction gingivale

Code	Conditionnement
C203227	2 cartouches de 50 ml + 1 flacon de Separator pour Gingifast de 10 ml + 12 embouts (extra small)



Gingifast CAD Rigid - Silicone par addition numérisable pour reproduction gingivale

Code	Conditionnement
C203232	2 cartouches de 50 ml + 1 flacon de Separator pour Gingifast de 10 ml + 12 embouts (extra small)

Accessoires

C400888



2 Separator pour Gingifast de 10 ml

C202085



Embouts de mélange - small (48 unités)

C202090



Embouts intra-oraux jaunes (48 unités)

C202100



Distributeur D2 - 1:1

C202087



Embouts de mélange - extra small (48 unités)

Plus d'informations sur les produits Zhermack associés pour la reproduction gingivale



Hydrorise Implant

Silicone par addition haute rigidité idéal en implantologie



Elite Rock

Plâtre extra dur de type 4 pour modèles maîtres dans les applications de prothèses fixes



Elite Base

Plâtre fluide de type 4 pour bases



Zetalabor

Silicone par condensation pour clés d'enregistrement

Pour de plus amples informations, visitez notre site web www.zhermack.com

Fulfilling your needs