


zeta hygiene



FEEL SAFE

Решения по обеспечению гигиены

Zhermack 
Dental

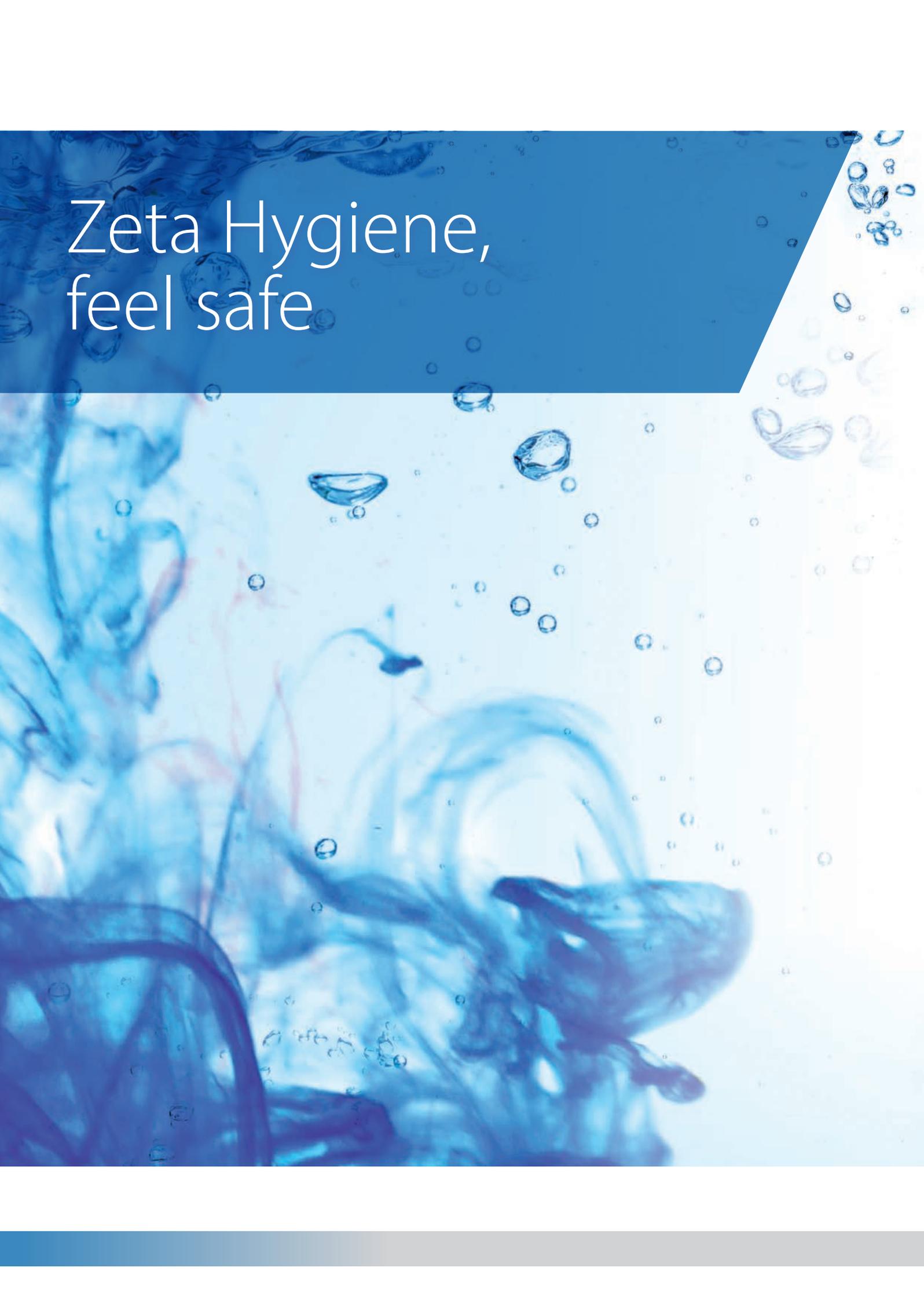

Zeta Hygiene,
feel safe

Надлежащее выполнение в стоматологической поликлинике и зуботехнической лаборатории процедур чистки, дезинфекции и стерилизации является гарантией защиты от инфекций.

Для защиты пациентов и персонала стоматологической поликлиники от опасности перекрестных инфекций необходимо не только строго соблюдать соответствующие процедуры, но и использовать **эффективные и безопасные** продукты, обладающие **широким спектром воздействия**.

Быстродействие, простота использования и высокая совместимость с различными материалами превращают Zeta Hygiene в идеальное решение для наиболее требовательных профессионалов, гарантирующее высокую степень безопасности и защиты как для пользователя, так и для пациента.

Zeta Hygiene представляет собой полную линейку продуктов для чистки, дезинфекции и стерилизации, не содержащих токсичных веществ,

таких как фенолы и альдегиды, и не оказывающих повреждающего действия на инструменты и рабочие поверхности стоматологического кабинета и зуботехнической лаборатории. В состав линейки входят инновационные растворы, изготовленные при соблюдении самых жестких стандартов производства и проверенные и протестированные согласно самым последним европейским нормативам.

Zeta Hygiene предлагает **эффективные решения**, обеспечивающие **надлежащий уровень защиты**.

Zhermack берет на себя заботу о вашей безопасности.

решения по обеспечению гигиены



инструменты и боры

Zeta 1 Ultra	стр. 8
Zeta 2 Enzyme	стр. 9
Zeta 2 Sporex	стр. 10



поверхности

Zeta 3 Soft	стр. 12
Zeta 3 Wipes TOTAL	стр. 13
Zeta 3 Foam	стр. 14
Zeta 3 Wipes POP-UP	стр. 15
Zeta 4 Wash	стр. 16



специальное применение

Zeta 5 Power Act	стр. 18
Zeta 7 Spray	стр. 20
Zeta 7 Solution	стр. 21
Algitray	стр. 22
Gypstray	стр. 23

Zhermack



инструменты и боры



Zeta 1 Ultra



инструменты и боры

Концентрированное жидкое дезинфицирующее и чистящее средство широкого спектра действия. Подходит для обычных, хирургических и вращающихся стоматологических инструментов.

Активные вещества: алкиламин и ЧАС

РАСТВОР 2% для широкого спектра дезинфекции

РАСТВОР 1% для быстрой дезинфекции

См. спектр действия ниже.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ▶ Высокий уровень защиты: широкий спектр действия.
- ▶ Эффективен также при наличии органических загрязнителей
- ▶ Высокоэффективная формула, концентрат.
- ▶ Лёгкость использования: короткое время действия и простота дозирования благодаря дозатору, встроенному в бутылку.
- ▶ Безопасность для пользователя: отсутствие альдегидов и фенолов

Способ применения

Раствор 2% (широкий спектр дезинфекции): разведите 20 мл концентрата в воде, чтобы получить 1 литр раствора. Погрузите инструменты в обычную ванночку с раствором на 60 минут или в ультразвуковую ванночку на 30 минут при температуре 35°C.

Раствор 1% (быстрая дезинфекция с ограниченным действием: бактерицидное, фунгицидное, ограниченно вирулицидное): разведите 10 мл Zeta 1 Ultra в воде, чтобы получить 1 литр раствора. Погрузите инструменты в обычную ванночку с раствором на 15 минут.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КАЖДЫЙ ЛИТР ZETA 1 ULTRA ПОЗВОЛЯЕТ ПРИГОТОВИТЬ 100 ИЛИ 50 ЛИТРОВ ГОТОВОГО РАСТВОРА.

Спектр воздействия

РАСТВОР 2% (ШИРОКИЙ СПЕКТР ДЕЗИНФЕКЦИИ)*

ОБЫЧНАЯ ВАННОЧКА:

Бактерицидное действие: EN 13727, EN 14561 (*S. aureus*, *P. aeruginosa*, *E. hirae*)

Фунгицидное действие: EN 13624, EN 14562 (*C. albicans*)

Микобактерицидное действие, в том числе Туберкулоцидное: EN 14348, EN 14563 (*M. terrae*, *M. avium*)

Вирулицидное действие: EN 14476 (Полиовирус, Аденовирус, Норовирус включая ВИЧ, вирус Гепатита В, вирус Гепатита С, эбола, вирус простого герпеса и все прочие человеческие и животные вирусы гриппа)

Бактерицидное, Фунгицидное (15 мин): Объединение Прикладной Гигиены **УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА:**

бактерицидное, фунгицидное, микобактерицидное (включая туберкулоцидное), вирулицидное действие.

РАСТВОР 1% (БЫСТРАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ)*

ОБЫЧНАЯ ВАННОЧКА:

Бактерицидное действие: EN 13727, EN 14561 (*S. aureus*, *P. aeruginosa*, *E. hirae*)

Фунгицидное действие: EN 13624, EN 14562 (*C. albicans*)

Ограниченное вирулицидное действие: ВИЧ, вирус Гепатита В, вирус Гепатита С, эбола, вирус простого герпеса и все прочие человеческие и животные вирусы гриппа (DVV/RKJ, prEN 16777)

Микобактерицидное, включая туберкулоцидное (60 мин): Объединение Прикладной Гигиены

**Испытания проводились в загрязнённой среде.*

Zeta 2 Enzyme



инструменты и боры

Концентрированное трехэнзимное порошковое моющее и дезинфицирующее средство с широким спектром действия. Специальное средство, предназначенное для обработки обычно используемых стоматологических инструментов, хирургических и вращающихся, перед их стерилизацией.

Активные вещества: Активный кислород, энзимы

РАСТВОР 2 %



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ▶ Высокий уровень защиты, достигаемая всего за 10 минут: оказывает бактерицидное, ограниченно фунгицидное, микобактерицидное, туберкулоцидное и вирулицидное действие
- ▶ Выполняет глубокую чистку также внутри микроструктур фрез и инструментов
- ▶ Усиленное очищающее действие благодаря содержащимся в составе продукта энзимам - амилазе, протеазе, липазе
- ▶ Безопасность для пользователя: не содержит альдегидов и фенолов

Способ применения

Раствор 2 %: отмерьте 20 г (2 мерника) **Zeta 2 Enzyme** на каждый литр воды (35°) и размешайте, чтобы способствовать растворению порошка. Подождите 15 минут. Погрузите инструменты в раствор на 10 минут. Приготовленный раствор, отличающийся мутностью вследствие присутствия энзимов, сохраняет стабильность в течение минимум 8 часов. Оставшийся на дне нерастворившийся порошок обеспечивает эффективность раствора на все время действия, приведенное в указаниях по применению продукта.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОЙ УПАКОВКИ ZETA 2 ENZYME ПОЛУЧАЮТСЯ 60 ЛИТРОВ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА

Спектр воздействия

Бактерицидное: EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)

Ограниченно фунгицидное: EN 13624, EN 14562 (C. albicans)

Микобактерицидное, включая туберкулоцидное: EN 14348, EN 14563 (M. terrae, M. avium)

Вирулицидное: (Полиовирус, Аденовирус, Норовирус, ВИЧ, вирус гепатита В, вирус гепатита С)

Испытания проводились в загрязнённой среде.

Zeta 2 Sporex



инструменты и боры

Средство для холодной стерилизации и дезинфектант высокого уровня в виде порошка. Для стоматологических инструментов, особенно тех, которые не подлежат стерилизации в автоклаве.

Активные вещества: Надуксусная кислота

РАСТВОР 2 %



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ▶ Высокий уровень защиты: оказывает бактерицидное, фунгицидное, микобактерицидное, туберкулоцидное, вирулицидное и спорицидное
- ▶ Обеспечивает выполнение холодной химической стерилизации всего лишь за 10 минут
- ▶ Безопасность для пользователя: не содержит альдегидов; образование надуксусной кислоты только при растворении исключает проблемы, связанные с использованием свободной надуксусной кислоты

Способ применения

Раствор 2 %: отмерьте 20 г (3 мерника) **Zeta 2 Sporex** на каждый литр воды и размешайте, чтобы способствовать растворению порошка. Подождите 15 минут - время, необходимое для активации раствора.

Погрузите инструменты в раствор на 10 минут. Оставший на дне нерастворившийся порошок обеспечивает эффективность раствора на все время действия, приведенное в указаниях по применению продукта. Приготовленный раствор остается стабильным в течение минимум 24 часов, но рекомендуется заменять его в начале каждого рабочего дня.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОЙ УПАКОВКИ ZETA 2 SPOREX ПОЛУЧАЮТСЯ 45 ЛИТРОВ СТЕРИЛИЗУЮЩЕГО РАСТВОРА

Спектр воздействия

Бактерицидное: EN 13727, EN 14561 (*S. aureus*, *P. aeruginosa*, *E. hirae*)

Фунгицидное: EN 13624, EN 14562 (*C. albicans*, *A. niger*)

Микобактерицидное, включая туберкулоцидное: EN 14348, EN 14563 (*M. terrae*, *M. avium*)

Вирулицидное: (Полиовирус, Аденовирус, Норовирус, Парвовирус, ВИЧ, вирус гепатита В и вирус гепатита С)

Спорицидное: EN 13704 (*B. subtilis*)

Испытания проводились в загрязнённой среде.

поверхности



Zeta 3 Soft




поверхности

Готовый к использованию, спиртосодержащий дезинфектант и чистящее средство для поверхностей медицинских изделий.

Активные вещества: Спирты

АРОМАТЫ ЛИМОНА И КЛАССИЧЕСКИЙ

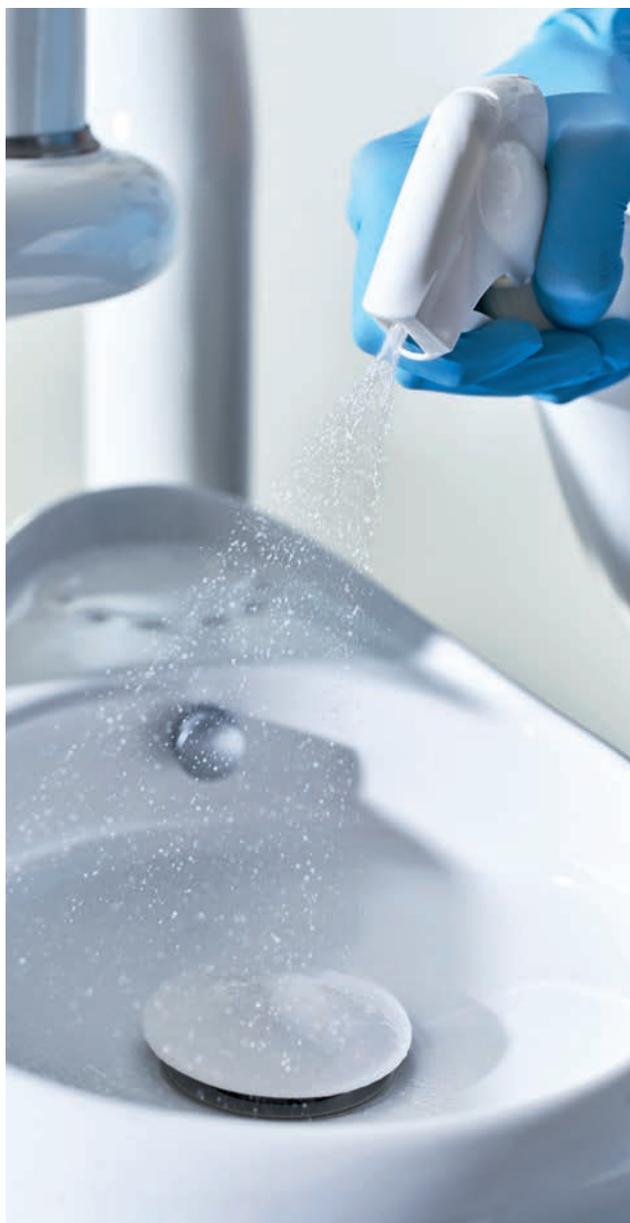

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ▶ Высокий уровень защиты: оказывает бактерицидное, ограниченно фунгицидное, туберкулоцидное и вирулицидное действие
- ▶ Эффект 2 в 1: дезинфекция и очистка выполняются одновременно
- ▶ Быстро высыхает
- ▶ Сниженное содержание спирта, менее 50 %
- ▶ Безопасность для пользователя: не содержит альдегидов и фенолов

Способ применения

Примените **Zeta 3 Soft** прямо на поверхность или на ткань. Тщательно протрите всю поверхность до того, как средство полностью испарится, и дайте высохнуть.

Спектр воздействия

Бактерицидное: EN 13727, EN 14561 (*S. aureus*, *P. aeruginosa*, *E. hirae*)

Ограниченно фунгицидное: EN 13624, EN 14562 (*C. albicans*)

Туберкулоцидное: EN 14348, EN 14563 (*M. terrae*)

Вирулицидное: (Полиовирус, Аденовирус, Норовирус, Парвовирус, ВИЧ, Вирус Гепатита В, Вирус Гепатита С, Вирус Гриппа H1N1)

Испытания проводились в загрязнённой среде.


Zeta 3 Wipes TOTAL



поверхности

Салфетки, пропитанные спиртосодержащим раствором, для быстрой очистки и дезинфекции небольших поверхностей медицинского оборудования.

Активные вещества: Спирты

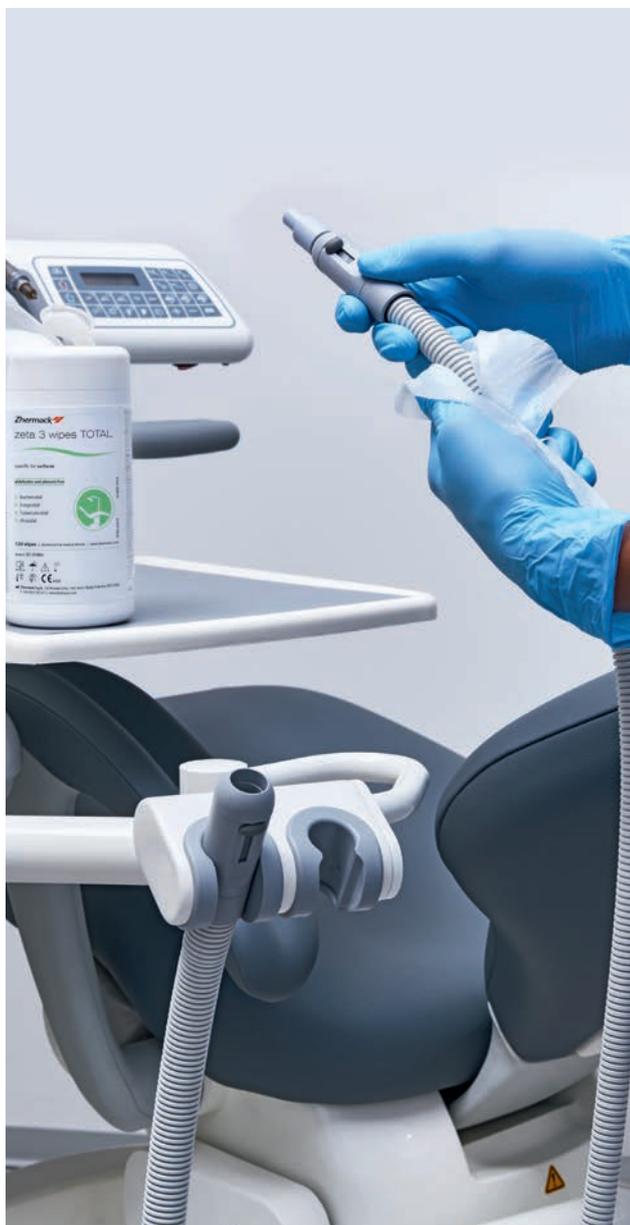

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ▶ Высокий уровень защиты: оказывает бактерицидное, фунгицидное, туберкулоцидное и вирулицидное действие
- ▶ Эффект 2 в 1: дезинфекция и очистка выполняются одновременно
- ▶ Быстро высыхает
- ▶ Сниженное содержание спирта, менее 50 %
- ▶ Безопасность для пользователя: не содержит альдегидов и фенолов

Способ применения

Тщательно протрите салфетками **Zeta 3 Wipes TOTAL** всю поверхность, подлежащую дезинфекции, и дайте ей высохнуть.

Спектр воздействия

Бактерицидное: EN 13727, EN 14561 (*S. aureus*, *P. aeruginosa*, *E. hirae*)

Фунгицидное: EN 13624, EN 14562 (*C. albicans*)

Туберкулоцидное: EN 14348, EN 14563 (*M. terrae*)

Вирулицидное: (Полиовирус, Аденовирус, Норовирус, Парвовирус, ВИЧ, Вирус Гепатита В, Вирус Гепатита С, Вирус Гриппа H1N1)

Испытания проводились в загрязнённой среде.

Стандарты, применимые к раствору.

Эффективность салфеток (согласно стандарту prEN 16615, при контакте продолжительностью 10 минут):

R>4Log vs. *S. aureus*, *E. hirae*

R>3Log vs. *C. albicans*, *P. aeruginosa*

Zeta 3 Foam



поверхности

Готовая к применению не содержащая спирта дезинфицирующая и чистящее средство пена. Особо подходит для очистки требующих бережного обращения поверхностей медицинских приспособлений и оборудования (наконечников, уголков, различных установок и т.п.).

Активные вещества: ЧАС 5-го поколения

АРОМАТ ЛИМОНА



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ▶ Высокий уровень защиты: оказывает бактерицидное, фунгицидное, туберкулоцидное и вирулицидное действие
- ▶ Подтверждённая совместимость с поверхностями, включая самые деликатные
- ▶ Практичность в использовании: пена способствует хорошему распределению активных веществ на дезинфицируемых поверхностях
- ▶ Безопасность для пользователя: не содержит альдегидов и фенолов



Способ применения

Распылите **Zeta 3 Foam** непосредственно на подлежащие дезинфекции предметы и поверхности и равномерно распределите салфеткой так, чтобы продукт покрыл все требующие обработки поверхности. Дайте высохнуть.

Спектр воздействия

Бактерицидное: EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)

Фунгицидное: EN 13624, EN 14562 (C. albicans)

Туберкулоцидное: EN 14348, EN 14563 (M. terrae)

Вирулицидное: (Полиовирус, Аденовирус, Норовирус, Парвовирус, ВИЧ, Вирус Гепатита В, Вирус Гепатита С, Вирус Гриппа H1N1)

Испытания проводились в загрязнённой среде.

Zeta 3 Wipes POP-UP



поверхности

Большие салфетки, пропитанные слабоспиртовым раствором, для быстрой дезинфекции и очистки поверхностей медицинских изделий, включая деликатные (стоматологические установки с кожаными креслами или креслами, обтянутыми искусственной кожей, поверхности из оргстекла, пр.)

Активные вещества: ЧАС

АРОМАТ МЯТЫ



ЭФФЕКТИВНО ПРОТИВ
**КОРОНА
ВИРУСА**



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ▶ Высокий уровень защиты: оказывает бактерицидное, фунгицидное, туберкулоцидное и вирулицидное действие
- ▶ Отличная совместимость со всеми материалами
- ▶ Высокопрочная, мягкая и плотная ткань.
- ▶ Безопасность для пользователя: не содержит альдегидов и фенолов

Способ применения

Тщательно протрите салфетками **Zeta 3 Wipes POP-UP** всю поверхность, подлежащую дезинфекции.

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕСТИРОВАННОЕ СРЕДСТВО

Спектр воздействия .|||||...

Бактерицидное: EN 13697, EN 1276*, EN 14561*, EN 14561 (MRSA)

Фунгицидное: EN 13697 (A. niger), EN 14562 (A. fumigatus)

Антидрожжевое: EN 1650*, EN 13624, EN 13697, EN 14562 (C. albicans)

Туберкулоцидное: EN 14348, EN 14563 (M. terrae)

Вирулицидное: EN 14476 (вирусы гепатита В и С, аденовирусы, коронавирусы, норовирусы, респираторно-синцитиальный вирус (VRS), полиомавирусы, H1N1, ротавирусы), EN 14476* (HSV)
В чистых условиях

Испытания проведены в чистой среде.

**Испытания проведены в загрязнённой среде.*

Zeta 4 Wash



поверхности

Концентрированное чистящее средство и дезодорирующий раствор для моющихся поверхностей.

Активные вещества: Неионные и катионные поверхностно-активные вещества



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ▶ Обеспечивает быструю и глубокую очистку, оставляя в воздухе приятный запах чистоты и свежести
- ▶ Совместимость со всеми материалами
- ▶ Степень биоразлагаемости свыше 90 %

Способ применения

Разведите 1-2 дозировочные крышечки на каждый литр воды. Для удаления наиболее стойких загрязнителей используйте влажную ткань, смоченную несколькими каплями концентрированного средства.

специальное применение



Zeta 5 Power Act



специальное применение

Специальное концентрированное дезинфицирующее и чистящее средство для аспирационных систем и плевательниц.

Активные вещества: ЧАС

РАСТВОР 1 %



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ▶ Высокий уровень защиты: оказывает бактерицидное, антидрожжевое, туберкулоцидное и ограниченное вирулицидное действие
- ▶ Быстродействующая формула: дезинфекция за 15 минут
- ▶ Подтверждённая совместимость с компонентами аспирационных систем.
- ▶ Не образует пены и не оказывает агрессивного воздействия на трубки аспирационных систем
- ▶ Лёгкость использования: короткое время действия и упрощённое дозирование благодаря дозатору, встроенному в бутылку.

Способ применения

Раствор 1 %: отмерьте 10 мл **Zeta 5 Power Act** на каждый литр воды и размешайте полученный раствор. Приготовьте примерно один литр раствора для каждой единицы оборудования. Втяните аспиратором приготовленный раствор. Дайте подействовать 15 минут для выполнения быстрой дезинфекции (без туберкулоцидного эффекта) или оставьте на ночь для полного воздействия. Налейте в плевательницу не менее 250-300 мл раствора и дайте ему подействовать.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОГО ЛИТРА ZETA 5 POWER ACT ПОЛУЧАЮТСЯ 100 ЛИТРОВ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА

Спектр воздействия


Бактерицидное: EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)

Антидрожжевое: EN 13624, EN 14562 (C. albicans)

Туберкулоцидное: EN 14348 (M. terrae)

Ограниченно вирулицидное действие: prEN 16777, DVV/RKI оказывает воздействие на инкапсулированные и липофильные вирусы, включая присутствующие в крови (ВИЧ, вирусы гепатита В и гепатита С), Herpes simplex и такие семейства вирусов как orthomyxoviridae (включая все вирусы гриппа человека и животных, в частности, H5N1 и H1N1), filoviridae (вирус лихорадки Эбола) и paramyxoviridae (вирус кори)

Бактерицидное, ограниченно Фунгицидное (Candida Albicans): VAH
Испытания проводились в загрязнённой среде.

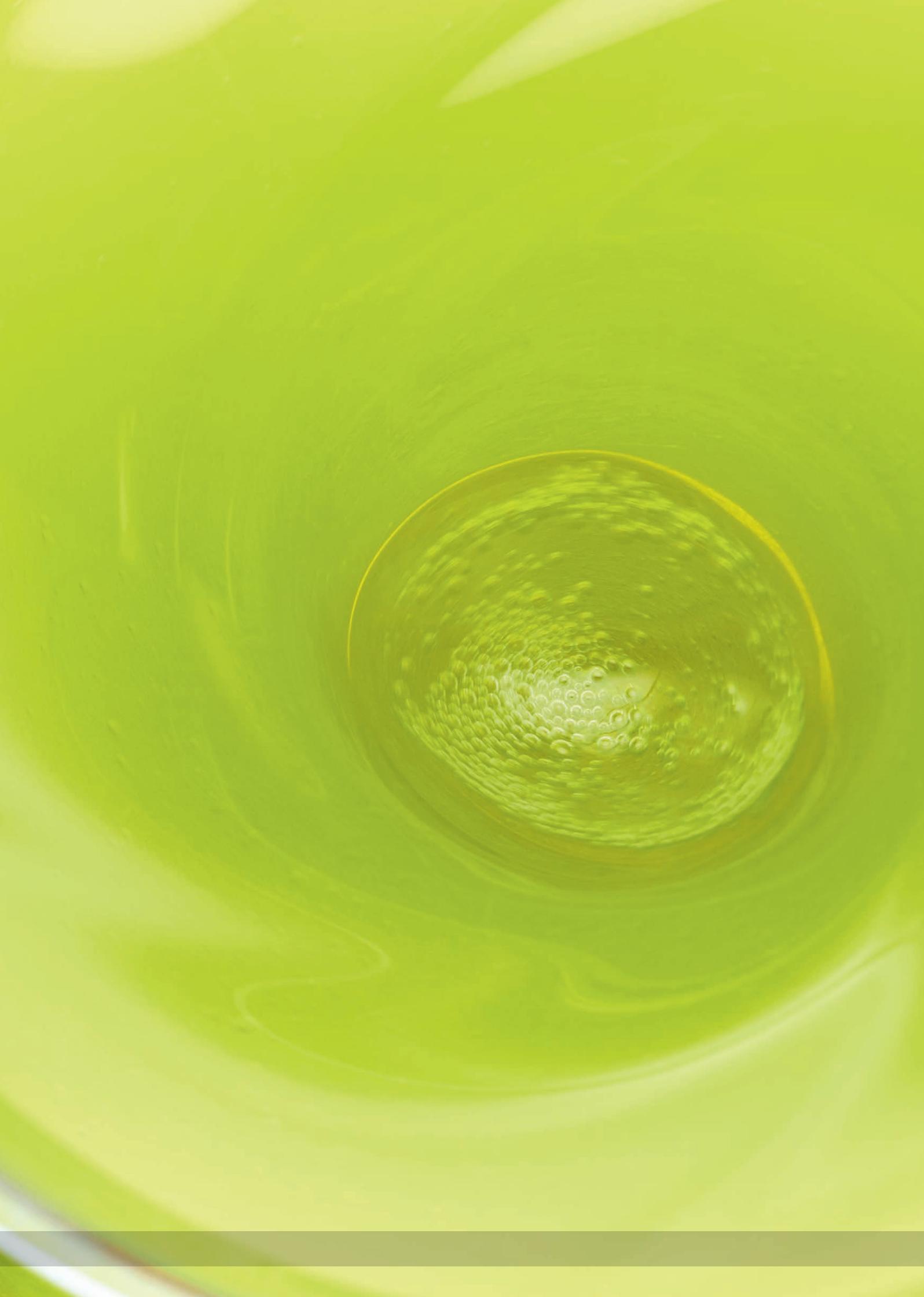

Zeta 7 Spray



специальное применение

Готовый к применению дезинфицирующий спрей для быстрой дезинфекции оттисков.

Активные вещества: Спирты



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ▶ Высокий уровень защиты: оказывает бактерицидное, фунгицидное, туберкулоцидное и вирулицидное действие
- ▶ Совместимость с материалами для получения оттисков: А-силиконами, С-силиконами, альгинатами, полиэфирными, полисульфидами и поливинилами
- ▶ Безопасность для пользователя: не содержит альдегидов и фенолов
- ▶ Практичное, быстрое и готовое к использованию, не требует ополаскивания, достаточно для дезинфекции до 250-ти оттисков.

Способ применения

Ополосните оттиск под проточной водой. Распылите на обе стороны оттиска **Zeta 7 Spray** так, чтобы получить тонкий непрерывный слой на всей его поверхности. Дайте спрею испариться в течение минимум 3 минут.

СОХРАНЯЕТ РАЗМЕРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ОТТИСКОВ

Спектр воздействия

Бактерицидное: EN 13727 (*S. aureus*, *P. aeruginosa*, *E. hirae*)

Фунгицидное действие: EN 13624 (*C. albicans*)

Туберкулоцидное: EN 14348, EN 14563 (*M. terrae*)

Вирулицидное: EN 14476 (испытано на полиовирусах, аденовирусах, норовирусах, паровирусах, включая ВИЧ, вирусы гепатита В и гепатита С)

Испытания проводились в загрязнённой среде.

Zeta 7 Solution



специальное применение

Концентрированное дезинфицирующее средство для дезинфекции оттисков.

Активные вещества: ЧАС, феноксиэтанол.

РАСТВОР 1 %



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ▶ Высокий уровень защиты: оказывает бактерицидное, фунгицидное, туберкулоцидное и вирулицидное действие против оболочечных вирусов
- ▶ Совместимость с оттисковыми материалами (А-силиконами, С-силиконами, альгинатами, полиэфирными, полисульфидами и поливинилами)
- ▶ Высокоэффективная формула, концентрат
- ▶ Не влияет на характеристики стабильности размеров оттисков и их совместимость с гипсами
- ▶ Безопасность для пользователя: не содержит альдегидов и фенолов

Способ применения

Раствор 1 %: отмерьте 10 мл **Zeta 7 Solution** на каждый литр воды.

Ополосните оттиск под проточной водой. Погрузите его на 10 минут в дезинфицирующий раствор. Выньте оттиск из ванночки и тщательно прополощите.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОГО ЛИТРА ZETA 7 SOLUTION ПОЛУЧАЮТСЯ 100 ЛИТРОВ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА. (С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО ЛИТРА РАСТВОРА МОЖНО ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ ДО 40 ОТТИСКОВ*).

*Раствор следует менять каждый день, а также незамедлительно в случае видимого загрязнения (кровью, слюной или органическими тканями).

Спектр воздействия

Бактерицидное: EN 13727 (*S. aureus*, *P. aeruginosa*, *E. hirae*)

Фунгицидное действие: EN 13624 (*C. albicans*)

Туберкулоцидное: EN 14348, EN 14563 (*M. terrae*)

Вирулицидное против оболочечных вирусов: EN 14476 (Вирус осповакцины, включая ВИЧ, вирусы гепатита В и гепатита С)
Испытания проводились в загрязненной среде.

Algitray



специальное применение

Специальное чистящее средство для удаления остатков альгината со слепочных ложек и инструментов. Не содержит фосфатов и ПАВов.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ▶ Не вреден для окружающей среды и пользователей: содержит до 98% биоразлагаемых чистящих компонентов
- ▶ Высокий уровень эффективности: позволяет быстро удалять все следы альгината со слепочных ложек и других инструментов
- ▶ Отсутствие вредного воздействия на инструменты: благодаря pH-нейтральному составу не оказывает агрессивного действия на металлы

Способ применения

Добавьте 100 граммов **Algitray** (4 мерных ложки) к одному литру воды и аккуратно размешайте до полного растворения. Удалите максимально возможное количество альгината с оттисковых ложек и инструментов. Погрузите оттисковые ложки и инструменты в раствор. Оставьте их в растворе в течение 15-30 минут. Извлеките оттисковые ложки и инструменты из раствора. Вычистите щёткой остатки альгинатов, а затем ополосните под проточной водой.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОЙ УПАКОВКИ ALGITRAY 1 КГ ПОЛУЧАЮТСЯ 10 ЛИТРОВ ЧИСТЯЩЕГО РАСТВОРА

Gypstray



специальное применение

Готовый к применению раствор для удаления остатков гипса и гипсовых паковочных масс со слепковых ложек, шпателя или иные инструменты.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ▶ Высокий уровень эффективности: позволяет удалять все следы гипса со слепочных ложек и других инструментов
- ▶ Практичность и готовность к применению
- ▶ Гарантия сохранности материалов: неагрессивный состав обеспечивает безопасность использования при всех применениях

Способ применения

Отмерьте количество **Gypstray**, необходимое для того, чтобы полностью покрыть поверхность подлежащих обработке предметов. Погрузите в раствор инструменты или слепочные ложки на 15-30 минут, в зависимости от типа и качества остатков. Шипение указывает на эффективность раствора.

Выньте предметы и прополощите их водой.



Упаковки



Средства для дезинфекции и стерилизации обычных инструментов, стоматологических хирургических инструментов и боров

Артикул	Продукт	Упаковка
C810000	Zeta 1 Ultra	Флакон 1 литр
C810012	Zeta 2 Enzyme	Банка 1200 г с мерником
C810011	Zeta 2 Sporex	Банка 900 г с мерником

Дезинфицирующие и чистящие средства для очистки поверхностей медицинского оборудования

Артикул	Продукт	Упаковка
C810023	Zeta 3 Soft	Флакон 750 мл с распылителем
C810024	Zeta 3 Soft	Канистра 5 л (2 x 2,5 л) с дозатором
C810027	Zeta 3 Soft Classic	Флакон 750 мл с распылителем
C810028	Zeta 3 Soft Classic	Канистра 5 л (2 x 2,5 л) с дозатором
C810025	Zeta 3 Foam	Флакон 750 мл с дозатором пены
C810026	Zeta 3 Foam	Канистра 3 л с дозатором
C810063	Zeta 3 Wipes TOTAL	Банка со 120 салфетками
C810062	Zeta 3 Wipes TOTAL	Пакет со 120 салфетками
C810064	Zeta 3 Wipes POP-UP	Упаковка «soft pack» со 100 салфетками
C810037	Zeta 4 Wash	Канистра 3 л



Средства для специального применения
Дезинфицирующие и чистящие средства для систем аспирации

Артикул	Продукт	Упаковка
C810040	Zeta 5 Power Act	Флакон 1 литр

Средства для специального применения
Дезинфицирующие средства для оттисков



Артикул	Продукт	Упаковка
C810050	Zeta 7 Spray	Флакон 750 мл с распылителем
C810048	Zeta 7 Solution	Флакон 1 литр

Средства для специального применения
Чистящие средства для очистки и удаления остатков альгината и гипса с инструмента



Артикул	Продукт	Упаковка
C400435	Algitray в порошке	Банка 2 x 500 г (порошок) + мерник
C400441	Gypstray	Канистра 3 л

Европейские стандарты

БАКТЕРИЦИДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

EN13727

Воздействие во взвешенном состоянии (фаза 2/1):

«Химические дезинфицирующие средства и антисептики - Количественный суспензионный метод испытания для оценки бактерицидного действия химических дезинфицирующих средств, предназначенных для обработки инструментов медицинского назначения».

EN14561

Воздействие на поверхности (фаза 2/2):

«Химические дезинфицирующие средства и антисептики - Количественный тест на определение переносчиков инфекции для оценки бактерицидного действия для инструментов медицинского назначения».

Ссылочные микроорганизмы:

Staphylococcus aureus (модельный грамположительный микроорганизм) ATCC 6538.

Pseudomonas aeruginosa (модельный грамотрицательный микроорганизм) ATCC 15442.

Enterococcus hirae (грамположительная бактерия, присутствующая в местах, загрязненных фекалиями) ATCC 10541.

Интерферирующие вещества:

0,3% бараньих эритроцитов и 0,3% бычьего альбумина (симулируют сильное загрязнение органическим материалом) - Грязные условия.

Требование:

уменьшение уровня микробов до $\geq 5 \log$ при заданных концентрациях и времени контакта.

ФУНГИЦИДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

EN13624

Воздействие во взвешенном состоянии (фаза 2/1):

«Химические дезинфицирующие средства и антисептики - Количественный суспензионный метод испытания для оценки фунгицидного действия для инструментов медицинского назначения».

EN14562

Воздействие на поверхности (фаза 2/2):

«Химические дезинфектанты и антисептики - Количественный тест на определение переносчиков инфекции для оценки фунгицидного или противодрожжевого действия для инструментов медицинского назначения»

Ссылочные микроорганизмы:

Aspergillus niger (модельный микроорганизм плесени) ATCC 16404

Candida albicans (модельный микроорганизм дрожжей) ATCC 10231

Интерферирующие вещества:

0,3% бараньих эритроцитов и 0,3% бычьего альбумина (симулируют сильное загрязнение органическим материалом) - Грязные условия.

Требование:

уменьшение количества микробов до $\geq 4 \log$ при заданных концентрациях и времени контакта.

МИКОБАКТЕРИЦИДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

EN14348

Воздействие во взвешенном состоянии (фаза 2/1):

«Химические дезинфицирующие средства и антисептики - Количественный суспензионный метод испытания для оценки микобактерицидного действия химических дезинфицирующих средств, применяющихся в медицине, в том числе дезинфицирующих средств, предназначенных для обработки инструментов».

EN14563

Воздействие на поверхности (фаза 2/2):

«Химические дезинфицирующие средства и антисептики - Количественный тест на стеклянной подложке для оценки микобактерицидного действия химических дезинфицирующих средств, предназначенных для обработки инструментов медицинского назначения».

Ссылочные микроорганизмы:

Mycobacterium terrae (испытания в отношении эффективности туберкулоцидного действия) ATCC 15755

Mycobacterium avium (непатогенная модель микробактерий sp.) ATCC 15769

Интерферирующие вещества:

0,3% бараньих эритроцитов и 0,3% бычьего альбумина (симулируют сильное загрязнение органическим материалом) - Грязные условия.

Требование:

уменьшение количества микробов до $\geq 4 \log$ при заданных концентрациях и времени контакта.

ВИРУЛИЦИДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

EN14476

Воздействие во взвешенном состоянии (фаза 2/1):

«Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Количественный тест во взвешенном состоянии для оценки вирулицидного действия химических дезинфицирующих средств и антисептиков, предназначенных для использования в медицине для человека».

Ссылочные микроорганизмы:

Модифицированный вирус осповакцины Анкара (MVA), ATCC VR-1508 и штамм Elstree вируса диареи крупного рогатого скота (BVDV), суррогат HCV (вирус гепатита C), NADL (VR-534).

Интерферирующие вещества:

3,0% эмбриональной бычьей сыворотки (симулирует наличие загрязнения кровью) - Грязные условия.

Требование:

уменьшение количества микробов до $\geq 4 \log$ при заданных концентрациях и времени контакта.

prEN16777 – DVV/RKI

Воздействие на поверхности (фаза 2/2):

Химические дезинфицирующие средства и антисептики - Количественный поверхностный тест для оценки вирулицидного действия химических дезинфицирующих средств, используемых в медицинской области для обработки плотных поверхностей без механического воздействия - Методика тестирования и предъявляемые требования (Фаза 2/Шаг 2)

Ссылочные микроорганизмы:

Модифицированный вирус коровьей оспы Анкара (MVA), ATCC VR-1508

Вирус вирусной диареи крупного рогатого скота (БВД), суррогат HCV (вируса гепатита C), NADL (VR-534)

Интерферирующие вещества:

эмбриональная бычья сыворотка (симулирует наличие загрязнения кровью)

- Грязные условия.

Требование:

уменьшение количества микробов до $\geq 4 \log$ при заданных концентрациях и времени контакта.

СПОРИЦИДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

EN13704

Воздействие во взвешенном состоянии (фаза 2/1):

«Химические дезинфицирующие средства и антисептики - Количественный суспензионный метод испытания для оценки спорицидного действия дезинфицирующих средств, предназначенных для обработки инструментов медицинского назначения».

Ссылочные микроорганизмы:

Bacillus subtilis var. niger ATCC 9372

Интерферирующие вещества:

0,03 % бычьего альбумина (симулирует загрязнение органическим материалом) - Чистые условия.

Требование:

уменьшение количества микробов до $\geq 3 \log$ при заданных концентрациях и времени контакта.

Fulfilling your needs